


Instrumentbordets funktioner

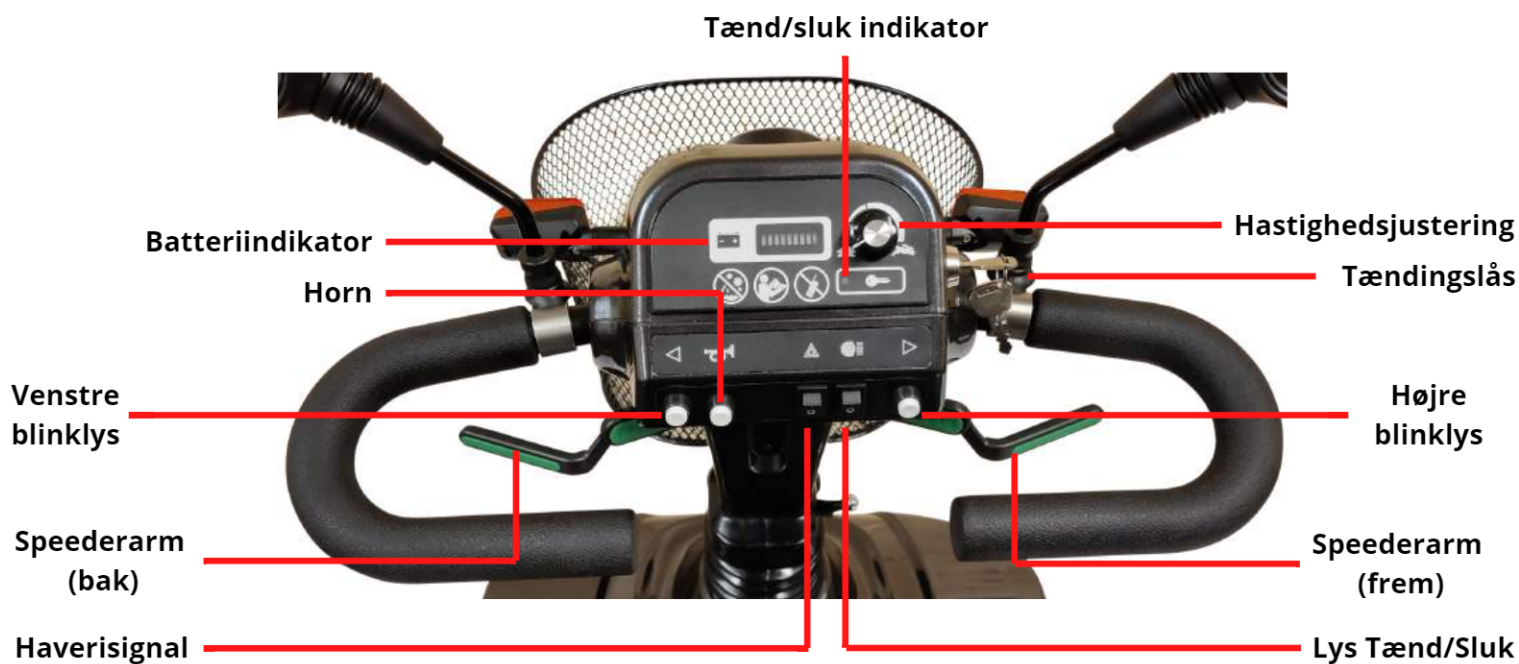

Inden du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

Tændingslås

Drej nøglen med uret for at tænde el-scooteren.
Sluk ved at dreje mod uret.

Lys

Tryk på lyskontakten for at tænde og slukke for scooterens lys.
Der skal lovpligtigt være lys på scooteren efter mørkets frembrud.

Blinklys

Tryk på venstre eller højre blinklyskontakt, for at vise hvilken vej du ønsker at dreje.
Tryk igen for at slukke for blinklyset.

Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.

Havari signal

Tryk på denne kontakt for at aktiverer havari signalet for og bag.
Tryk igen for at slukke havari signalet.

Batteriindikator

Angiver det aktuelle strøm niveau.

Når batteriindikatoren viser **3 røde**, **2 gule** og **4 grønne** streger, er batteriet fuldt opladt.

I takt med strømmen bliver brugt, slukker 1 streg ad gangen.

Først slukker de **GRØNNE streger**, derefter de **GULE streger**, og til sidst de **RØDE streger**.

Er batteriet brugt ned til de **RØDE** streger, anbefaler vi, at du hurtigst muligt, får sat scooteren til opladning. Derved undgår du at køre tør for strøm.

Hastighedsjustering

Justerer scooterens laveste og højeste hastighed. Skildpadde-symbolet angiver laveste fart, mens kanin-symbolet angiver højeste fart.

Tænd-/slukindikator / funktionsfejl

Er scooteren tændt, lyser denne indikatorlampe konstant.

Ved funktionsfejl blinker indikatorlampen.

Antallet af gange lampen blinker, indikerer fejlen.

Se fejkoder på sidste side i denne manual.

Speederarm

Bruges til at få scooteren til, at køre frem eller tilbage, samt kontrollere fart og acceleration.

- Træk højre side ned mod dig, selv for at køre frem. Skub den frem for at bakke.
- Træk venstre ned mod dig selv, for at bakke. Skub den frem for at køre frem.
- Farten stiger i takt med, at speederarmen trækkes tilbage.
- Scooteren kan køres med én hånd.