

# Instrumentbordets funktioner



**Inden** du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

## Tændingslås

Drej nøglen med uret for at tænde el-scooteren.  
Sluk ved at dreje mod uret.

## Lys

Tryk op på lyskontakten for at tænde og ned for at slukke for scooterens lys.  
Der skal lovpligtigt være lys på scooteren efter mørkets frembrud.

## Blinklys

Tryk blinklyskontakten op for at blinke til venstre og ned for at blink til højre.  
Tryk knappen tilbage i midterste position for at slukke.

## Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.

## Høj og lav gear

Tryk knappen op for at gå i høj gear. Scooteren kan nu kører max hastighed.  
Tryk knappen ned for at gå i lav gear. Scooteren kører nu i lavere hastighed.

## Batteriindikator

Angiver det aktuelle strøm niveau.

Når batteriindikatoren viser **3 røde**, **2 gule** og **4 grønne** streger, er batteriet fuldt opladt.

I takt med strømmen bliver brugt, slukker 1 streg ad gangen.

Først slukker de **GRØNNE streger**, derefter de **GULE streger**, og til sidst de **RØDE streger**.

Er batteriet brugt ned til de **RØDE** streger, anbefaler vi, at du hurtigst muligt, får sat scooteren til opladning. Derved undgår du at køre tør for strøm.

## Hastighedsjustering

Justerer scooterens laveste og højeste hastighed.

Kontakten drejet helt til venstre, er den laveste fart, og kontakten drejet helt til højre, er den højeste fart.

## Tænd-/slukindikator / funktionsfejl

Er scooteren tændt, lyser denne indikatorlampe konstant.

Ved funktionsfejl blinker indikatorlampen.

Antallet af gange lampen blinker, indikerer fejlen.

Se fejlkoder på sidste side i denne manual.

## Speederarm

Bruges til at få scooteren til, at køre frem eller tilbage, samt kontrollere fart og acceleration.

- Træk højre side ned mod dig, selv for at køre frem. Skub den frem for at bakke.
- Træk venstre ned mod dig selv, for at bakke. Skub den frem for at køre frem.
- Farten stiger i takt med, at speederarmen trækkes tilbage.
- Scooteren kan køres med én hånd.