
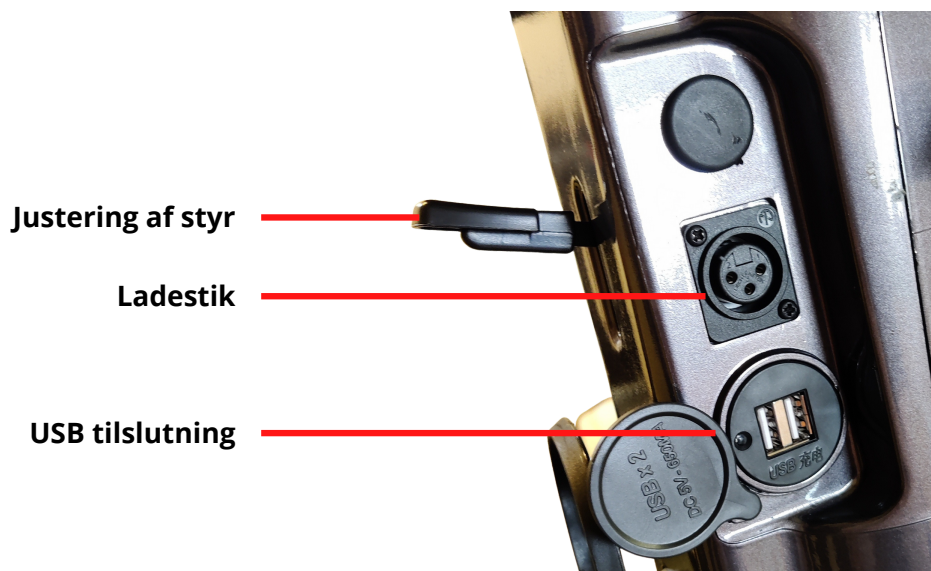


Instrumentbordets funktioner

Inden du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

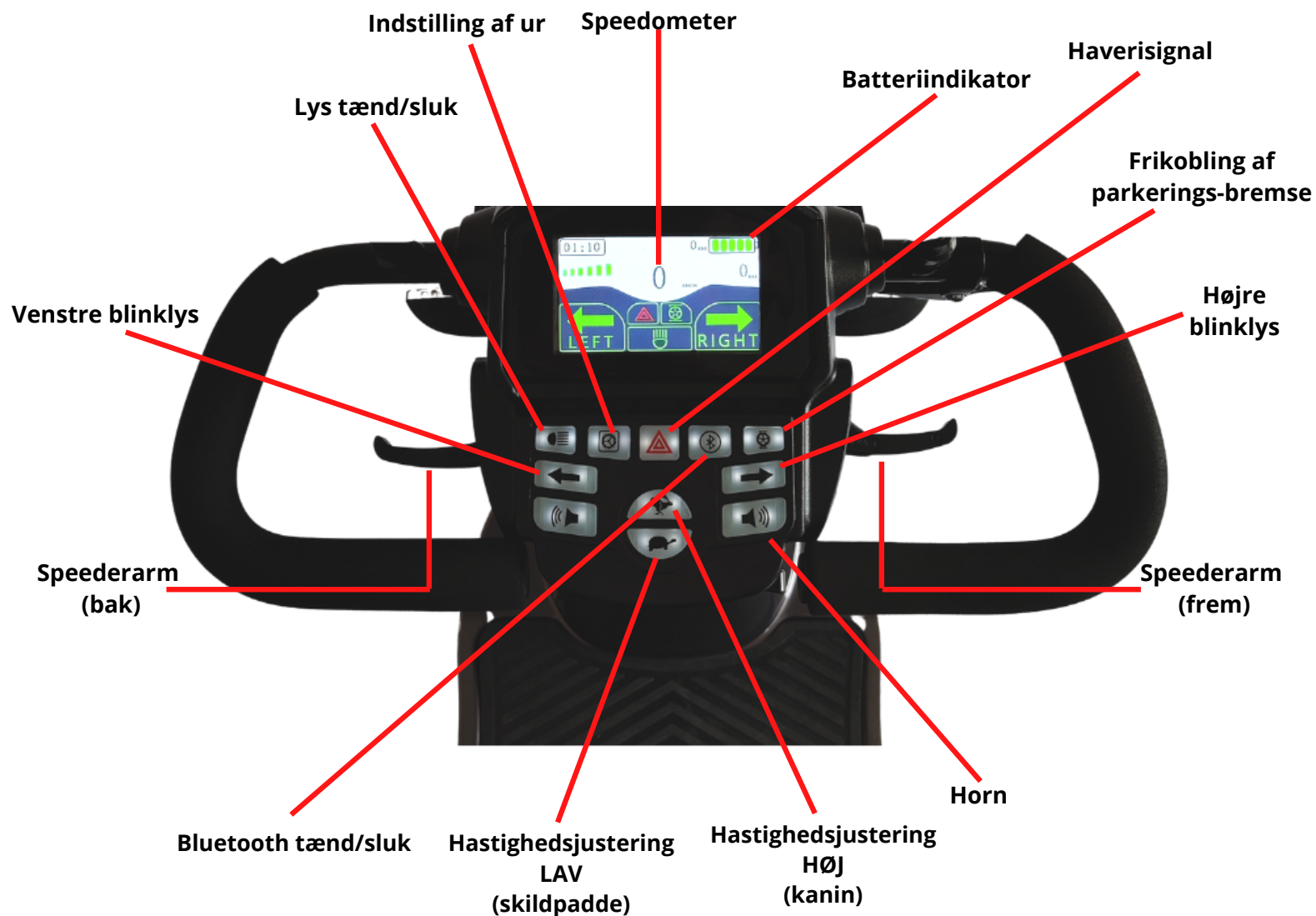

Fjernbetjent nøgle

Modellen er udstyret med en fjernbetjent nøgle med 2 knapper.

Tænd ved at trykke på den ene knap. Display tænder.

Sluk ved at trykke på den anden. Display slukker.

Lys

Tryk på lyskontakten for at tænde og slukke for scooterens lys foran og bagved.

Der skal lovpligtigt være lys på scooteren efter mørkets frembrud.

Blinklys

Tryk på venstre eller højre blinklyskontakt, for at vise hvilken vej du ønsker at dreje.

Tryk igen for at slukke for blinklyset.

Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.

Havari signal

Tryk på denne kontakt for at aktiverer havari signalet for og bag.

Tryk igen for at slukke havari signalet.

Kopholder

Kopholderen er placeret på ratstammen, under styret.

Justering af styr

Tryk håndtaget ned og justér styret til den ønskede vinkel.

Slip håndtaget igen for at låse styret.

Frikobling af parkeringsbremse

Hold denne knap inde for at frikoble parkeringsbremsen.

Du kan nu flytte el-scooteren.

Slip igen for at aktivere parkeringsbremsen igen.

Indstilling af ur

Hold denne knap inde for at indstille uret.

I display vises nu klokken:

Brug venstre blinklyskontakt og hornkontakt i venstre side for at indstille timer.

Brug højre blinklyskontakt og hornkontakt i højre side for at indstille minutter.

Tilslutning af Bluetooth

1. Tænd bluetooth på scooteren ved at trykke på  ikonet.
2. Tænd mobilens bluetooth
3. Søg efter ny enhed
4. Tilslut til enheden "bluetooth"
5. Mobilen er nu tilsluttet.

Speedometer


Digital speedometer udstyret med:

- Hastighedsmåler viser hvor stærkt du kører.
- Triptæller viser hvor mange kilometer scooteren har kørt.
- Batteriindikator angiver køretøjets aktuelle strøm niveau.
- Digital ur viser hvad klokken er.
- Hastighedsniveau.
Er alle seks streger vist, står den i højeste hastighedsniveau og kører 15 km/t.

Batteriindikator

Angiver det aktuelle strøm niveau.


Når batteriindikatoren viser **fem hele streger**, er batteriet fuldt opladt.

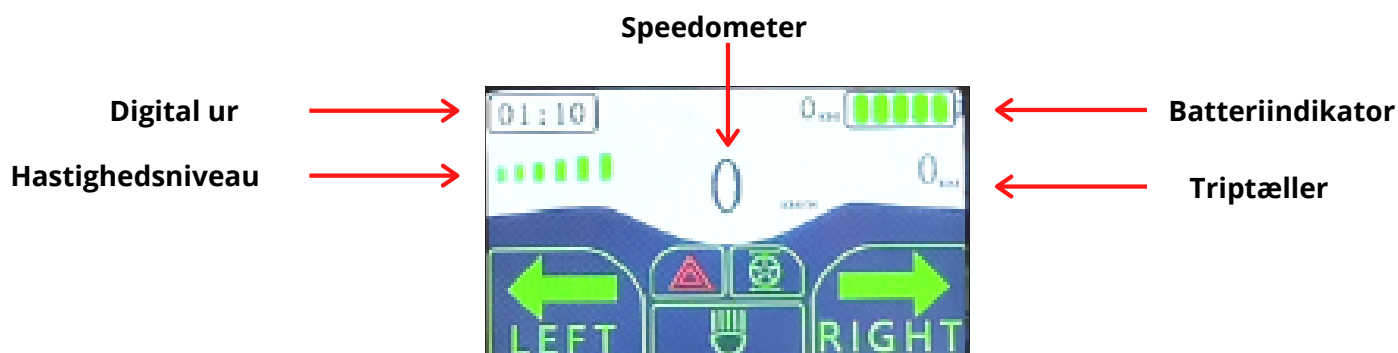

I takt med strømmen bliver brugt, slukker én streg ad gangen.



Er batteriet nedladt til den sidste streg, anbefaler vi, at du hurtigst muligt, får sat scooteren til ladning. Derved undgår du at køre tør for strøm.

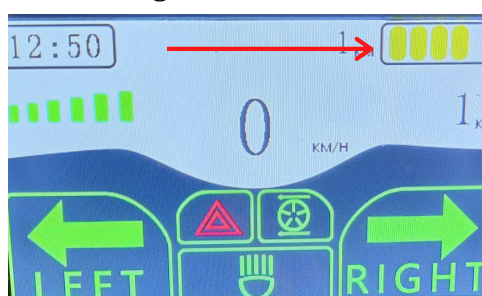

Hastighedsjustering

Justerer scooterens mindste og højeste hastighed. Skildpadde-symbolet angiver laveste fart, mens kanin-symbolet angiver højeste fart.

Tænd-/slukindikator / funktionsfejl

Er scooteren tændt, lyser denne indikatorlampe konstant.

Ved funktionsfejl blinker indikatorlampen.

Antallet af gange lampen blinker, indikerer fejlen.

Se fejlkoder på sidste side i denne manual.

Speederarm

Bruges til at få scooteren til, at køre frem eller tilbage, samt kontrollere fart og acceleration.

- Træk højre side ned mod dig, selv for at køre frem. Skub den frem for at bakke.
- Træk venstre ned mod dig selv, for at bakke. Skub den frem for at køre frem.
- Farten stiger i takt med, at speederarmen trækkes tilbage.
- Scooteren kan køres med én hånd.