

# Starte Handi One

Tillykke med din nye Handi One – Sådan kommer du i gang!

For at lære mere om de forskellige trin, se *Håndbogen*.



## 1. Starte Handi

Tryk på *Tænd-/sluk-knappen* for at starte. Vent indtil startmenuen for Handi vises.

## 2. Forbind Handi til myAbilia

MyAbilia giver supportmedarbejdere mulighed for at hjælpe med Handi via internettet. For at være i stand til at logge på myAbilia skal Handi være forbundet til internettet, og du har brug for en myAbilia-konto.

**Har du allerede en myAbilia-konto?** Følg instruktionerne nedenfor.

**Vil du oprette en myAbilia-konto?** Start en webbrowser, gå til [myAbilia.com](http://myAbilia.com), vælg *Opret konto*, og indtast dit navn og din e-mailadresse. I velkomst-e-mailen, der kommer fra myAbilia, kan du klikke på et link for at vælge en adgangskode.

For at forbinde Handi til myAbilia:

1. Start appen **Hurtigindstillinger** og fjern markeringen af Wi-Fi.
2. Tryk på pilen og vælg ønsket trådløst netværk.
3. Gå til **Handi Indstillinger** og vælg myAbilia.
4. Indtast e-mailadressen og adgangskoden.
5. Tryk på **Log in**.
6. Fjern markeringen af *Synkronisere* og tryk på **OK**. Data overføres nu fra Handi til myAbilia.

## 3. Husk dine loginoplysninger

Du er velkommen til at skrive dine loginoplysninger ned for ikke at glemme dem. Husk at opbevare sedlen et sikkert sted.

### **HUSK - Mit login til Handi og webservice myAbilia**

Brugernavn: \_\_\_\_\_

Adgangskode: \_\_\_\_\_

## 4. Tips: Tilpas Handi

Handi kan tilpasses på mange måder, så den passer til brugerens behov. For tip, se kapitlet *Kom i gang med Handi* i *Håndbogen*.

## 5. Tips: Brug myAbilia-webservicen

Start en webbrowser på en computer eller tablet. Gå ind på [www.myabilia.com](http://www.myabilia.com) og log ind med dine kontooplysninger. Fra myAbilia kan du nemt hjælpe med aktiviteter, billeder osv. i Handi.