

Anne Polar fodbremse varenr. 600-301



Anne Polar fodbremse, kan køre med stolen låst op, og låse ved behov. Stellet fylder ikke meget fremad, så stolen kan komme helt ind til køkkenbordet.

Højdejustering: Håndtag i venstre side. Hold håndtaget oppe, mens du enten letter dig eller lægger vægt i, for at ændre højden på stolen.

Sædekip: Forreste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, er sædet låst op og kan tippe frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse den ønskede position. Kan du ikke få den til det, skyldes det at ryglænet er for langt fremme. Stå evt. af stolen, og tip det med hænderne, og lås så ved at tage håndtaget ned.

Ryglæn: Bagerste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, følger ryglænet dig frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse i ønsket position. Bagpå stolen, sidder der en håndskrue, til højdejustering af ryglænet.

Bremse: På fodkrydset sidder der en pedal. For at låse stolen, trædes pedalen fremad. For at låse op, trædes pedalen bagud. Stolen kan bestilles med bremsen siddende i den side du ønsker.

Vi giver 5 års garanti på stolen, hvis noget skulle gå i stykker. Garantien gælder fra fakturadatoen.