


Quick Guide

CareBidets - JH4000+

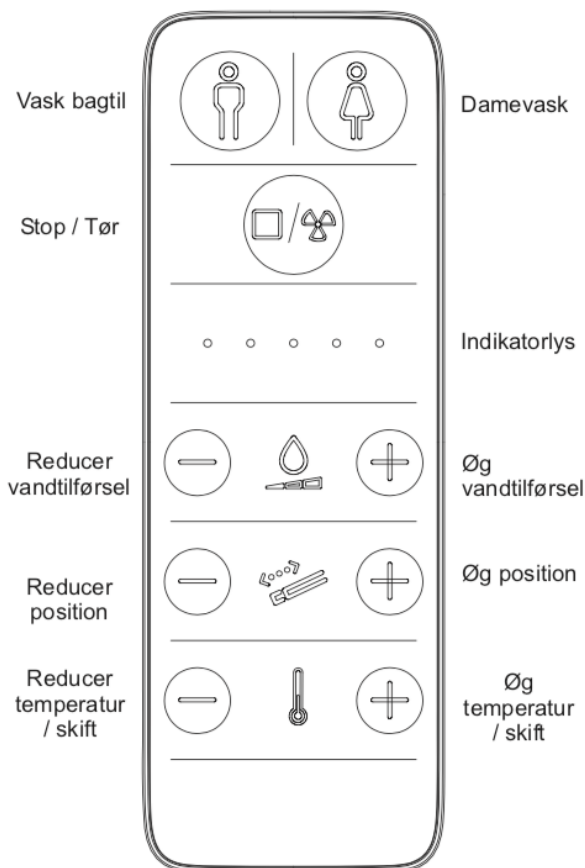

Tips & gode råd

Hvordan skal jeg sidde på toilettet?

Læn overkroppen fremover, således at ballerne spredes. På den måde kan vandstrålen rengøre mest effektivt. Indstil herefter dysearmens position efter behov.

Typiske fejl: Du læner overkroppen tilbage og glider frem på sædet. Ballerne lukker sammen og vandstrålen kan ikke gøre ordentlig rent.

Bemærk

Hvis toilettet ikke er blevet anvendt i 72 timer, vil den næste gang produktet aktiveres gennemføre et 3 minutters selvrensingsprogram. Vaskefunktionen kan ikke aktiveres i de 3 min. programmet kører.

Quick Guide

Automatisk betjening

1. Tryk én gang på kontakten og dit personlige vaske-tørreprogram aktiveres.
2. Vent til produktet har gennemført hele programmet. Først starter den med at:
 - a. Vaske bagtil
 - b. Vaske Fortil (damevask) – Hvis indstillet til kvindelig bruger.
 - c. Tørring
3. Har du behov for at afbryde programmet undervejs tryk på kontakten igen.
4. Du kan indstille dit automatiske vaske-og tørreprogram efter dine personlige præferencer. Læs mere i manualen til produktet.



Tips & gode råd

Hvordan skal jeg sidde på toilettet?

Læn overkroppen fremover, således at ballerne spredes. På den måde kan vandstrålen rengøre mest effektivt. Indstil herefter dysearmens position efter behov.

Typiske fejl: Du læner overkroppen tilbage og glider frem på sædet. Ballerne lukker sammen og vandstrålen kan ikke gøre ordentlig rent.

Bemærk

Hvis toilettet ikke er blevet anvendt i 72 timer, vil den næste gang produktet aktiveres gennemføre et 3 minutters selvrensingsprogram. Vaskefunktionen kan ikke aktiveres i de 3 min. programmet kører.