

# Quick guide: ErGo Tilt 4000.

Dato. 23/3-22

## 1. Hæve og sænke stol.

1a) Højdejustering af stolens sæde, op - ned.

## 2. Indikator for overbelastning.

2a) Lyser ved overbelastning.

## 3. Sæde kip frem og tilbage.

3a) Sædevinkel justering.

### 3b) nødfir ved at holde begge knapper.

3c) 1 stol ned, 2 sædevinkel til vandret.

3d) Bruges kun ved knapsvigt.

## 4. stop.

4a) Stop af alle funktioner, når aktiveret blinker dioder.

**OBS! 0-stilles ved at holde knappen nede 5 sek.**

## 5. Batteri indikator.

5a) Viser hvor meget strøm der er tilbage.

5b) 3 dioder tændt = fuld opladet.


5c) Der er lys og lydsignal.

**OBS! Stolen kan kun køre retur, ved lavest stand.**


## 6. Lade lampe.

6a) Kontrol af batteri og viser når der lades.

**OBS! Stolen kan ikke betjenes når der lades.**

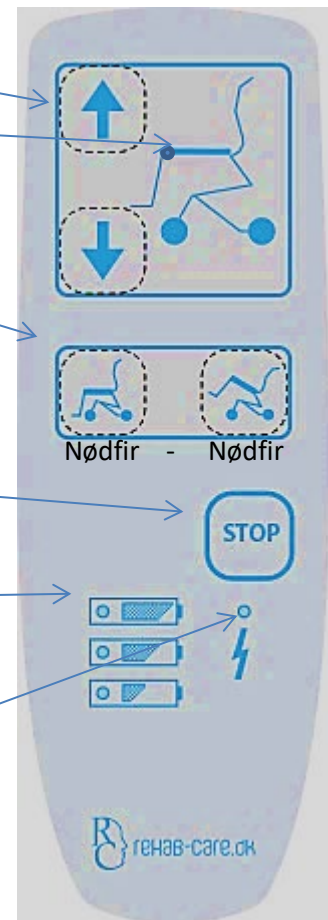

Håndbetjening udskiftes uden værktøj: Stik til håndbetjening er bag låg i styreboksen.

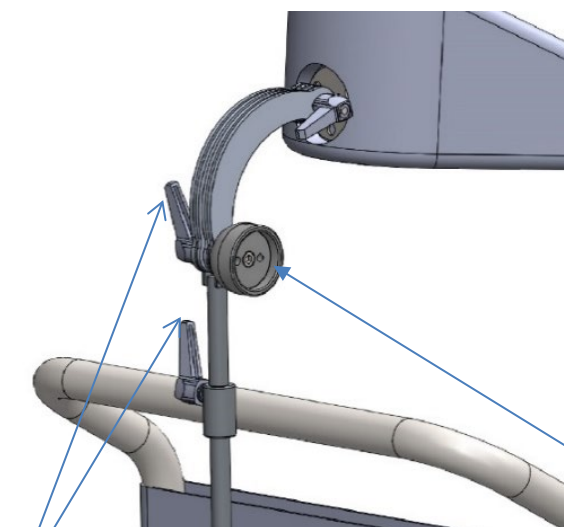

Nakkestøtte justering.

Lade stik parkering.