



Kvikguide til

# Clover Book XL


forstørrelsesapparat

Fold Clover Book XL ud



Så er Clover Book XL klar til brug!

Opladning


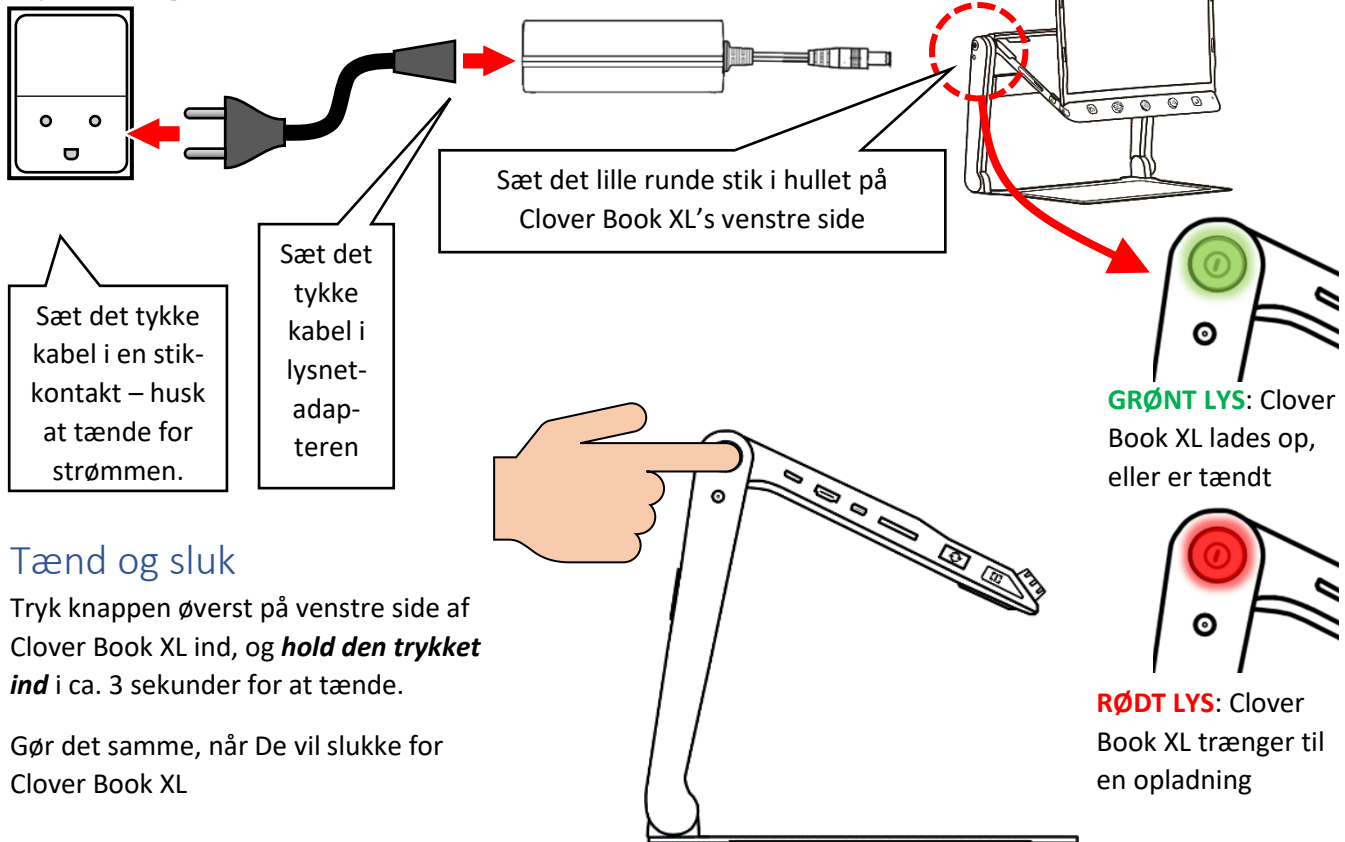


Tænd og sluk

Tryk knappen øverst på venstre side af Clover Book XL ind, og **hold den trykket ind** i ca. 3 sekunder for at tænde.

Gør det samme, når De vil slukke for Clover Book XL

## Forstørre og formindske

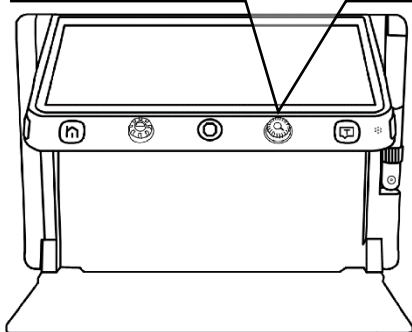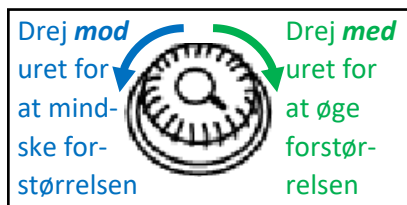


igen, skal De trykke knappen ind. Se tegningen til højre.

Knappen med lup-symbolet (næst-yderst til højre på forkanten af skærmen; se tegningen til venstre) findes på alle Clover Book XL-modeller; drej på den for at justere størrelsen på billedet.

## Farver og stærkere kontrast


Ved at dreje på den anden knap fra venstre på forkanten af skærmen kan De få vist tekst mv. med ekstra stærk kontrast, og i forskellige farver. For at få skærmen til at vise naturlige farver

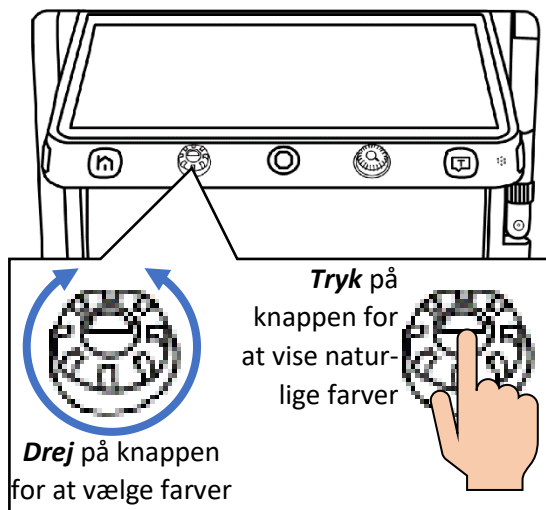

## Fasthold billedet

De kan fastholde billedet på skærmen ved at trykke på den orange knap forrest langs skærmens højre kant (se tegningen til venstre): Så bliver billedet stående på skærmen, selv om De fjerner avisen/bogen/etc. under apparatet.

Tryk på samme knap igen for at gøre billedet "levende" igen

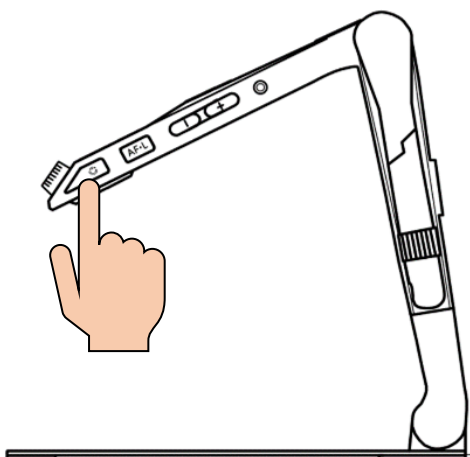

**Husk:** Denne kvik-guide viser kun de mest grundlæggende funktioner. Deres Clover Book XL kan rigtig meget mere end vist her; det er alt sammen beskrevet i den egentlige vejledning.