

Quickguide Foldbar badestol

Montagebeskrivelse

a) Opstilling af stolen

1. Drej siderne (A) og (B) fremad, således at der er 90 graders vinkel mellem dem og bagsiden.
2. Placer røret fra siddeenheden (C) ind i beslagene (D), således at samlingen er stabil og låst.

b) Justering af siddehøjden (benenes længde)

Siddehøjden skal justeres til brugeren. Siddehøjden er korrekt, når brugeren sidder på stolen og begge fødder rører gulvet samtidig med at lårene er vandrette.

1. Træk låseclip'en (A) ud af stolens ben..
2. Juster den teleskopiske del af benet til den ønskede længde..
3. Skub clip'en (A) ind i hullet (B).
4. Gentag proceduren for de andre ben.

VIGTIGT! Juster ikke stolens højde, medens der sidder nogen på den.