

Quickguide Toiletforhøjer med sæde og armlæn, varenummer 301702

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk



Beskrivelse af samling

Fjern det eksisterende toiletsæde og låg. Placér og monter gummiafstanden så den passer til hullerne på toiletkummen, og juster monteringsbeslagenes position på samme måde. Fastgør toiletsædet med plastikmonteringskiverne og -møtrikkerne som vist til højre.

Fastgør armlænene som beskrevet i afsnittet

Funktionsbeskrivelse.

Funktionsbeskrivelse

Montering og afmontering af armlæn

For at montere et armlæn skal du løsne og tage skruen ud fra den side af bagmonteringsbeslaget, som du vil sætte armlænet i. Skub armlænsrørets ende gennem monteringsbeslaget fra den valgte side. Juster hullet i armlænsrørets ende til at passe med det valgte hul i det valgte bagmonteringsbeslag, så skruen kan gå igennem begge dele. Sæt skruen i, og stram den. Gentag for det andet armlæn.

Hvis du vil afmontere et armlæn, skal du løsne og tage skruen til bagmonteringsbeslaget på det valgte armlæn ud og trække armlænet ud. Sæt skruen i igen, og spænd den.

