


Quickguide Foldbar toiletstol, varenummer: 302011

Montagebeskrivelse

a) Opstilling af stolen

1. Drej siderne (A) og (B) fremad, således at der er 90 graders vinkel mellem dem og bagsiden.
2. Placer røret fra siddeenheden (C) ind i beslagene (D), således at samlingen er stabil og låst.
3. Skub spanden ind over skinnerne under siddeenheden fra forsiden af stolen..
4. Læg låget ned hvis det er løftet.

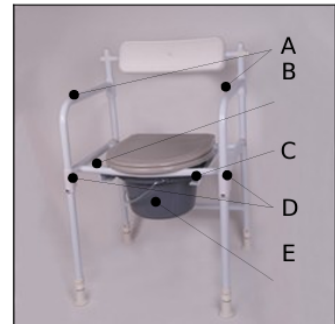

b) Justering af siddehøjden (benenes længde)

Siddehøjden skal justeres til brugeren. Siddehøjden er korrekt, når brugeren sidder på stolen og begge fødder rører gulvet samtidig med at lårene er vandrette.

1. Træk låseclip'en (A) ud af stolens ben..
2. Juster den teleskopiske del af benet til den ønskede længde..
3. Skub clip'en (A) ind i hullet (B).
4. Gentag proceduren for de andre ben.



VIGTIGT! Juster ikke stolens højde, medens der sidder nogen på den.

Transportbeskrivelse

Stolen kan let foldes for transport.

Tilbehør

Den foldbare toiletstol har ikke noget tilbehør