

# Quickguide gummiramper

## Montage og samvejledning

Monteringsset for gummiramper består af to montagebeslag som monteres i dørtrinnet. Det er så muligt at montere gummiramper uden at klæbe rampen på underlaget (varenr. 306910).



Monteringsset (306910)



Montagebeslag monteret i dørtrinnet



Limoverførsels-tape (306911+12)



Rensemiddel for limrester (306905)

## Tilskæring af gummiramper

Gummiramperne tilpasses let i bredden med en skarp hobbykniv eller savblad fra Mobilex (varenr. 306904). Ved højere ramper er det nødvendigt at skære flere gange i samme spor. Efter hver snit brækkes rampen bagover for at lette næste snit.



Tilskæring af lav rampe



Tilskæring af høj rampe



Rampe klar til brug

## Mulighed for at kombinere ramperne med modulopbygning

Mål på ydersiden, indvendigt og muligvis højden af en gummirampe. Vælg passende ramper. Kan også modulopbygges oven på hinanden.

