

# VIKING

Quick Guide (DA)

CE



REHASENSE



**Varenumre:**  
**RRSENCHL600**  
**RRSENCHM500**



1. Lås og bærehåndtag
2. Håndbremse
3. Skueknop til højdejustering
4. Taske med sikkerhedsreflekser



### Udfoldning af VIKING rollatoren

1. Tryk på den røde låseknop for at låse den foldede rollator op
2. Tryk siderne af sædet helt udad



3. Tryk hårdt ned på begge sider af sæderammen for at låse rollatoren på plads



### Foldning af VIKING rollatoren

1. Løft håndtaget på sædet opad for at låse rammen op
2. Tryk siderne ind mod hinanden, indtil den røde lås klikker på plads



### Højdejustering af VIKING håndtagene

1. Løsn skruen for højdejustering



2. Skub håndtaget opad/nedad til den ønskede højde
3. Brug markeringerne på indersiden sammen med fordybningerne på røret for sikkert at sikre højden
4. Stram knappen igen for højdejustering




#### Anbefalet højdeposition for håndtag

5. Håndtaget skal ideelt set placeres i samme højde som brugerens håndled, når man står med en let bøjet albue.



#### Aktiv bremsning

Klem bremsehåndtaget på begge sider for at bremse og forhindre rollatoren i at bevæge sig

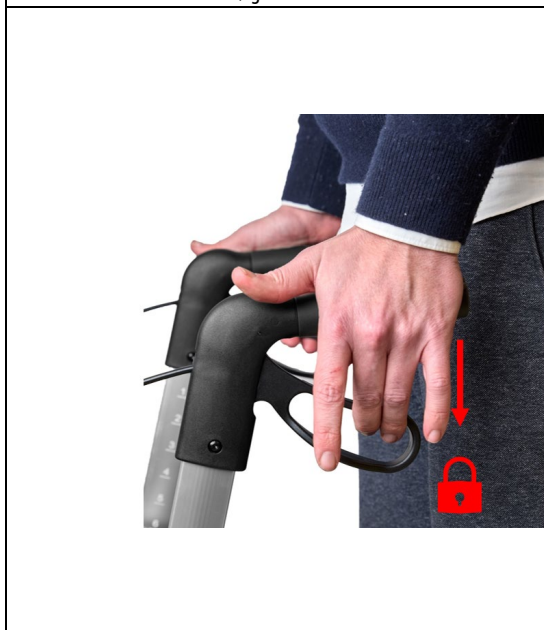

#### Parkeringsbremse

1. Tryk bremsehåndtaget ned i låst position for at forhindre rollatoren i at rulle, selv når brugeren slipper håndtagene
2. Af sikkerhedsmæssige årsager skal parkeringsbremsen aktiveres, når brugeren ønsker at sidde på rollatorsædet
3. Af sikkerhedshensyn skal parkeringsbremsen aktiveres, når brugeren ønsker at rejse sig eller sætte sig ned under brug af rollatoren



#### Sådan bærer du en VIKING rollator

1. Løft rollatoren ved hjælp af håndtaget øverst på rammen
2. Dette hjælper med at løfte forhjulene, hvilket kan være nyttigt, når du går op ad trapper eller til at rulle rollatoren langs jorden