


Scan QR koden i sengens fodende for en detaljeret videoguide

Opstilling af Modux



1. Sikr dig at hjulene i hovedenden er låst i den ønskede placering af sengen. (Hovedenden er den ende hvor fjernbetjeningen og strømforsyning sidder.)
2. Løft låsen i begge sider uden at fjerne dem helt fra sengen.



3. Brug nu fjernbetjening til at folde sengen ud.

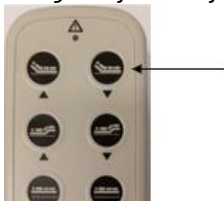

4. Træk nu låsen helt ud og placer den under sengens ramme i dens holder midt på sengens underside. Der sidder et firkantet rør på undersiden som låsen kan sidde i. Låsen kan derefter løftes op og sættes fast i en holder.

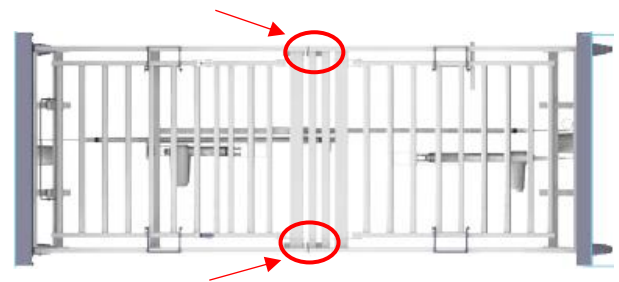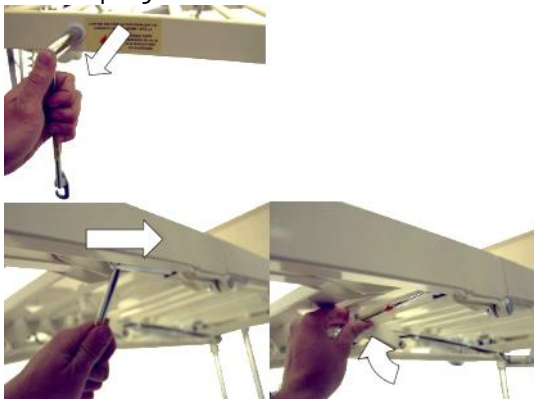


5. Sengehestene skal nu kobles på siden, mærkninger på siden af sengen i fodenden viser hvordan den skal vende. Mærkerne på sengehesten og sengen skal placeres overfor hinanden



6. Fjern splitten i bunden af sengehestens bane i fodenden. Bemærk den sidder på den anden side af skruen.



7. Pindene kan nu trækkes ud, **bemærk!** rækkefølge og orientering af pindene. Billedet her er vist med siden der skal vende indad mod sengen.

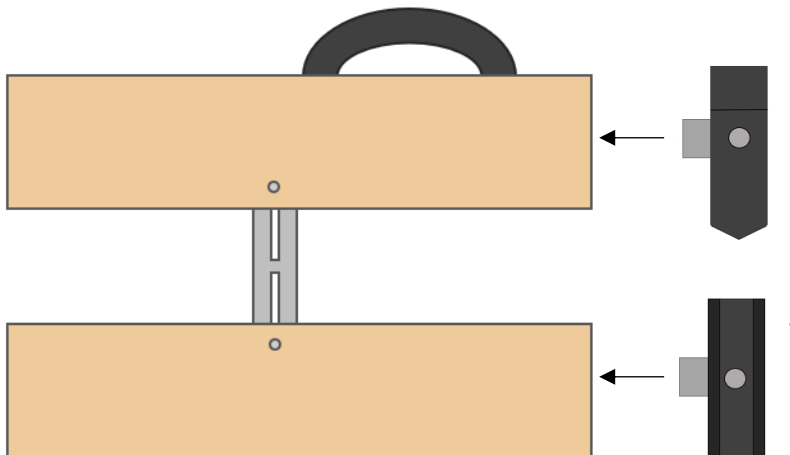

8. Sengehesten sættes først fast i hovedenden ved at matche sengehestens huller op med pindene i hovedenden. (**Bemærk** pindene i hovedenden skal ikke tages ud.)
9. Pindene kan nu indsættes i fodenden af sengehesten og skal indsættes i samme rækkefølge og orientering som de sad i sengens skinne. Skruen kan sættes tilbage i bunden og splitten sættes i skruen igen efter at sengehesten sidder i fodendens bane.



10. Sengehesten kan nu gnidningsfrit løftes op og ned i skinnen og kan låses i toppen ved hjælp af en knap på siden.
11. Afsluttende kan man sikre sig at sengen har fri bevægelighed fra ledninger og vægge inden man påbegynder brug. Det anbefales også at lade hjulene være låst når sengen ikke transporteres.