



Badestol (til forflytning til badekar)

Nødstop

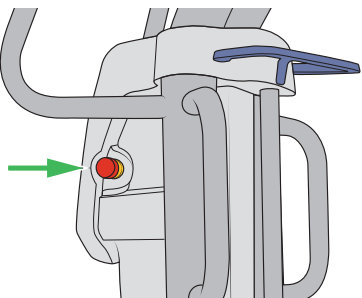

Tryk på nødstopknappen for at afbryde alle funktioner.

Backup høj/lav

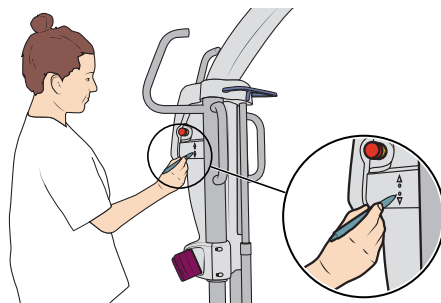

Tryk på nødstoppet.
Indsæt en tynd, stump genstand i hullet, og tryk for at hæve eller sænke badestolen.


Sikkerhedsseler

1



Forflytning af patienten/
plejemodtageren til bade stolen.

2

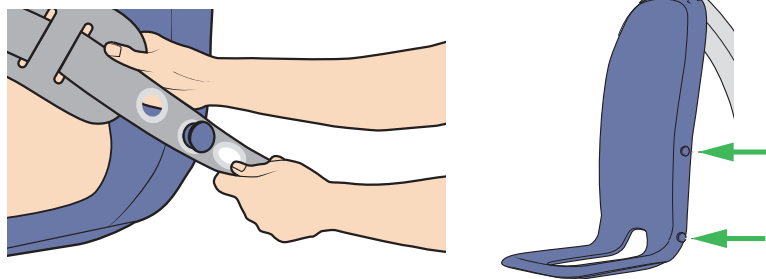

Fastgør den ene ende til seleknappen på siden af sædet.
Hoftesikkerhedssæle: Brug den nederste seleknap.
Brystsikkerhedssæle: Brug den øverste seleknap.


3



Risiko for kvælning.


Spænd sikkerhedsselerne på den anden side af sædet.
Sørg for, at sikkerhedsselerne er placeret under armene.

4

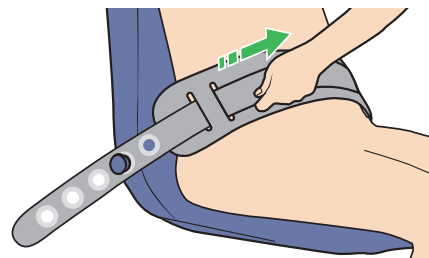


Træk i sikkerhedsselen for at kontrollere, at den sidder ordentligt fast.


Benstøtte – brug

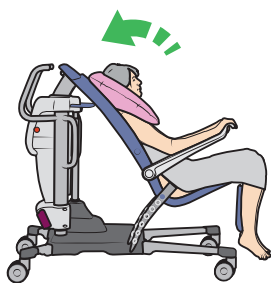

Vip sædet tilbage.


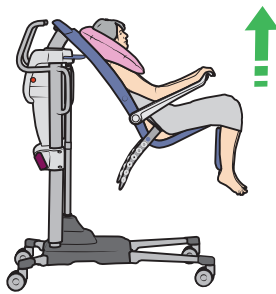


Hæv badestolen.

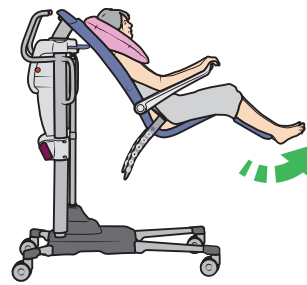


Justér benstøtten.

Klap ud

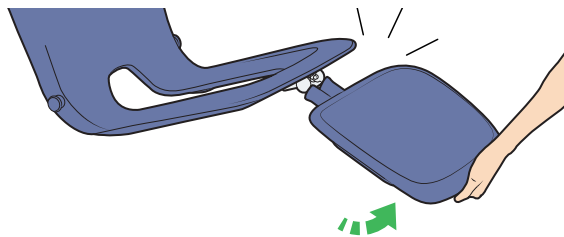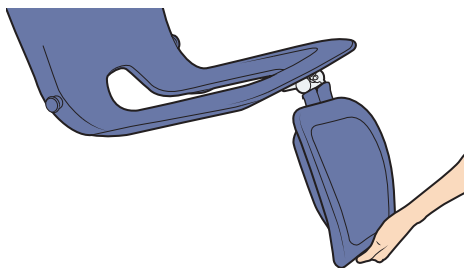


Løft benstøtten, indtil den låses på plads.

Klap væk

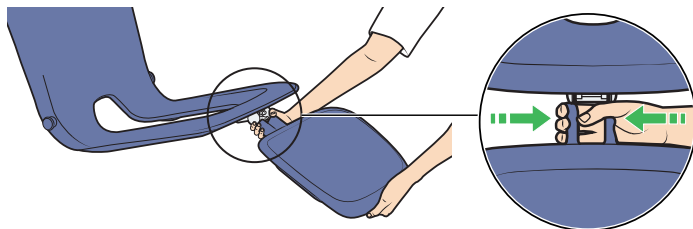


Løft benstøtten en smule, og tryk fastgørelsesstifterne sammen.

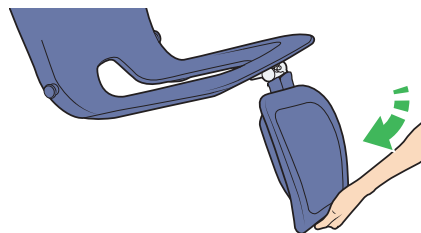

Sænk benstøtten.


Benstøtte – Fastgørelse og fjernelse

Fastgørelse

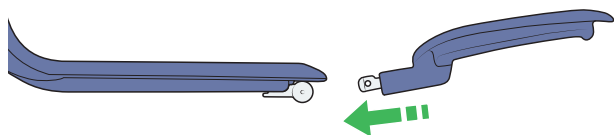

Hold benstøtten som vist.
Indsæt hængselaksen i hængslet.


Fjern

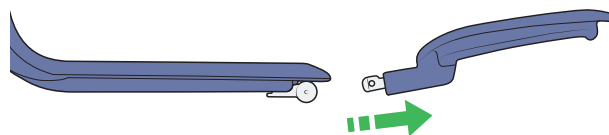


Løft benstøtten som vist.
Tryk fastgørelsesstifterne sammen,
og løft benstøtten ud af hængslet.

Bremser

Hjulbremser

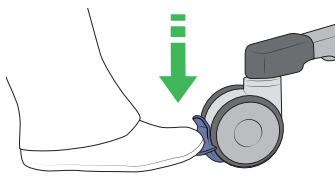


Aktivér ved at træde bremsepedalen ned på alle fire hjul.

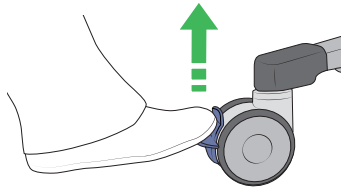

Løft bremsepedalen på alle fire hjul for at frigøre dem.


Centralbremse

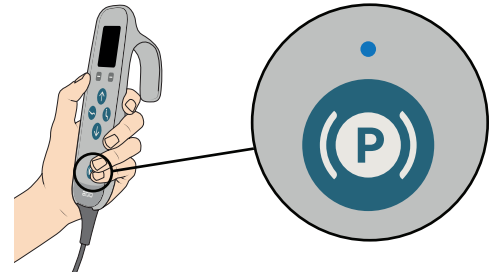

Tryk for at aktivere eller deaktivere centralbremsen.
Blåt lys = bremses aktiveret.


Armlæn

Fastgørelse

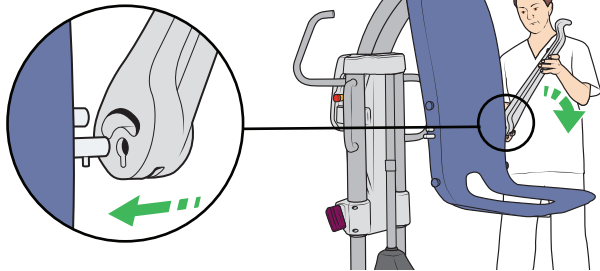


Hold armlænet som vist for at fastgøre det. Justér hullerne over fastgørelsesstifterne, og skub mod sædet.

Fjern

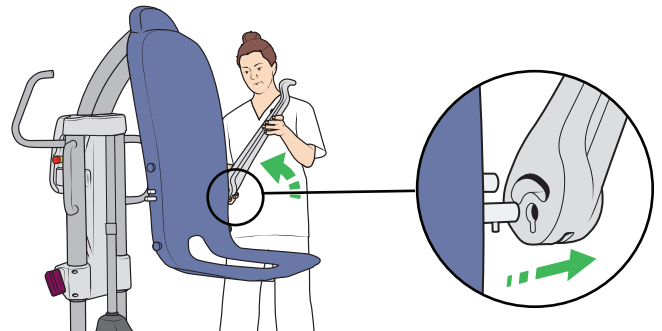

Fjern armlænet ved at klappe det op som vist. Træk lige ud.

Manøvreringshåndtag

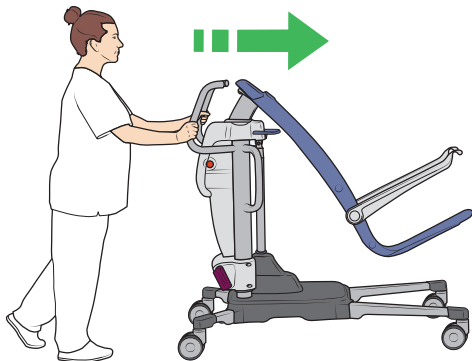

Brug de øverste manøvreringshåndtag til transport.



Brug de nederste manøvreringshåndtag under styring og ompositionering.