

1. Forord



Dette er en original Quick Guide til TransferAid, det er vigtigt at den fulde brugermanual gennemlæses inden ibrugtagning. Denne Quick Guide er alene til brug for genopfriskning af produktets basale funktioner.

2. Ladning af TransferAid

TransferAid skal lades i min. 6 timer inden første ibrugtagning.

Det anbefales at lade TransferAid hver dag/nat for at sikre produktet er opladt og klar til brug.

Indikatoren lyser kun, når produktet er tændt. Produktet tændes automatisk ved tryk på "ON" eller en af piletasterne.

OPLADNING MÅ IKKE FORETAGES:



- I vådrum.
- Hvis produktet er vådt.
- I forbindelse med brug af produktet (kan ikke køre, når det er tilsluttet 230V stikkontakt).



TransferAid skal lades i min. 6 timer inden den tages i brug!

3. Betjening af TransferAid

For at tænde TransferAid, tryk på "ON" tasten eller  OP/NED piletasterne på betjeningspanelet. Kontroller, at TransferAid er opladet før brug.

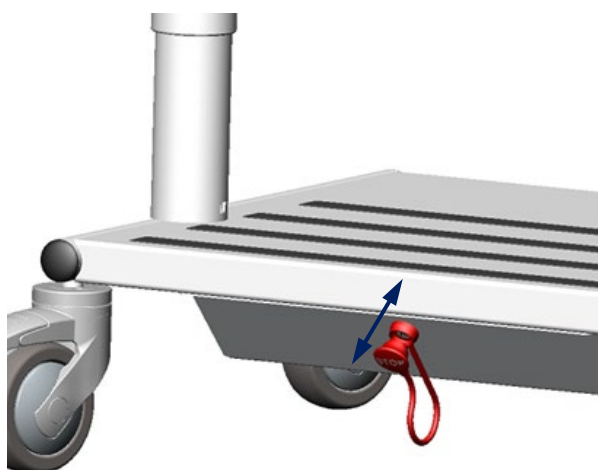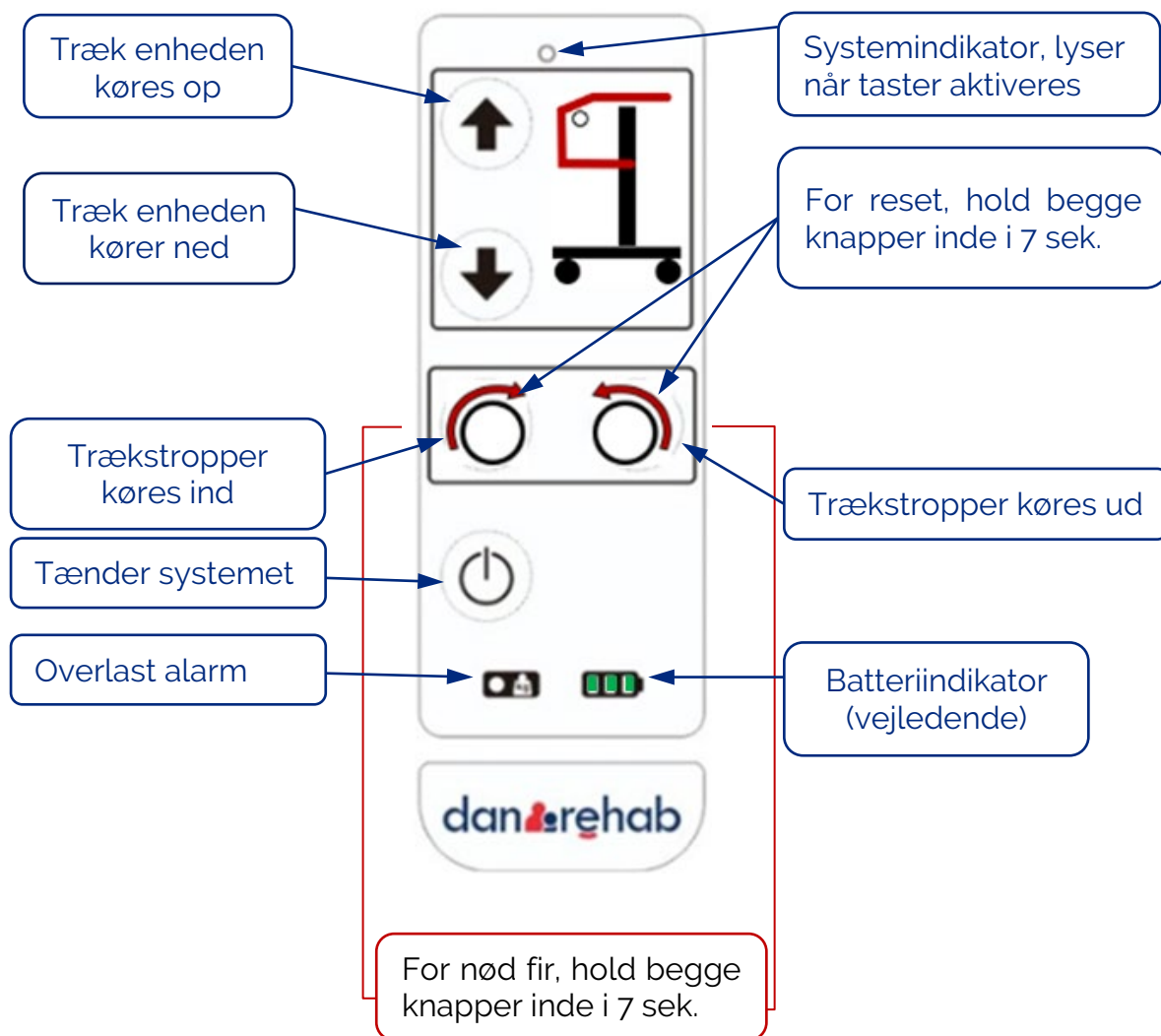

4. Nødstop

I tilfælde af utilsigtet kørsel, eller anden form for fare opstår, kan nødstopet anvendes ved at hive i STOPknappen. Når stopknappen ikke er på sin plads, kan produktet ikke køre, alt strøm til systemet afbrydes.

For at genaktiveres sættes stopknappen blot tilbage på plads. Knappen snapper selv på plads via de indbyggede magneter.