

## MONTERING OG OPSÆTNING

### Komponenter

Din Elio Carbon leveres omhyggeligt pakket i en papkasse.  
Åbn toppen af kassen, og læg derefter kassen på siden for lettere at trække kørestolen og indholdet ud.

Joystick



Stol



Værktøj



Oplader



Litiumbatteri



Sikkerhedssele



Pude



Brugsanvisning



1. For at folde Elio Carbon ud, tag fat i toppen af ryglænet og træk op, samtidig med at du presser ned på sædet for at åbne kørestolen og fuldføre monteringen (se billede 1).





2. Fortsæt med at folde kørestolen ud til siddeposition, indtil du hører et KLIK, som bekræfter, at den er låst i rigtig position (se billede 2).

3. Find sædepuden og rygbetrækket frem, som følger med. Placer sædepuden således, at bagsiden af puden og velcrolåsen på undersiden stemmer overens med velcrolåsen på sædet (se billede 3).



4. Monter joysticket i den åbne holder på armlænet på højre side (kan flyttes til venstre side ved behov). Stram skruen under armlænet for at fastgøre joysticket (se billede 4).



5. Tilslut controllerens ledningsstik til CPU-ledningsstikket. Sørg for at justere stifterne korrekt i henhold til pilmarkeringen, så de ikke bøjes, knækker eller beskadiges (se billede 5).

## Montering af sikkerhedssele

Sikkerhedssele har til funktion at begrænse forskydning og dæmpe bevægelser samt forhindre, at brugeren glider fremad i sædet. Selen kan justeres for optimal komfort. Ved en ulykke vil den holde brugeren sikkert på plads og reducere risikoen for personskade ved sekundær kollision.

### 1. Montering af sikkerhedssele:

Sørg for, at sikkerhedssele er fastgjort omkring taljen og til den nedre del af ryglænsrammen på den elektriske kørestol.

### 2. Justering af sikkerhedssele efter brugerens komfort:

Fastgør selen, indtil du hører et tydeligt klik. Juster bæltet til en passende længde. Det skal sidde godt, men ikke være så stramt, at det medfører ubehag.

### 3. Løsne sikkerhedssele:

Tryk på knappen på spændet for at åbne selen.

### Advarsel!

Sørg for, at sikkerhedssele er korrekt fastgjort til den elektriske kørestol og justeret til en komfortabel position for brugeren. Kontrollér, om selen er løs eller beskadiget. Hvis du opdager et problem, skal du kontakte forhandleren for vedligeholdelse og reparation.

## BATTERI

### Montering af batteri



Grib om batterihåndtaget, juster den nederste ende af batteriet med hakket i batteribeskyttelsesboksen og sæt det i. (Sørg for, at batteriet er sat helt ind, så batteriets låsemekanisme klikker ind i sporet i batteribeskyttelsesboksen) (Se billede 6).

### Afmontering af batteri

Tryk på låsemekanismen under batteriet med fingeren (se billede 7), og grib samtidig om håndtaget på batteriboksen og træk den ud (se billede 8).



Sørg for, at strømmen til kørestolen er afbrudt, før du gør dette.

## SAMMENKLAPNING OG UDFOLDNING


### Sammenklapning af stolen

1. Hold øverst på ryglænsrammen med én hånd. Med den anden hånd vipper du sikkerhedslåsen bag på stolen ned for at låse op.
2. Løft fronten af sædet op med hånden for at klappe kørestolen sammen.
3. Pres toppen af ryglænet og fronten af sædet mod hinanden.
4. Klap fodstøtten/pladen sammen.



### Udfoldning af kørestolen

1. Fold først fodstøtten ud.
2. Hold øverst på ryglænet med én hånd og fronten af sædet med den anden.
3. Pres hænderne fra hinanden, indtil du hører et «klik», som bekræfter, at kørestolen er helt udfoldet.

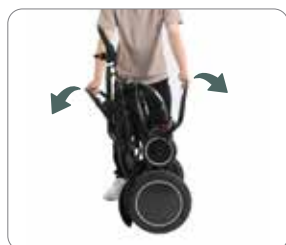

# JOYSTICK

## Kontrolpanel

Elio Carbon er udstyret med en joystick-controller. De forskellige funktioner er vist nedenfor.

**Sænk hastighed**  
Hver berøring reducerer hastigheden ét niveau.

**Øg hastighed**  
Hver berøring øger hastigheden ét niveau.

**Venstre skærmknop**  
Skifter skærmvisning.

**Strømbryder**

- Tryk på knappen for at tænde kørestolen og sætte den i standbytilstand.
- Hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke for strømmen.

**Højre skærmknop**  
Skifter skærmvisning.

**Advarselslyd**  
Et pip høres, når kørestolen tændes, og når der trykkes på knapperne på kontrolpanelet.

**USB Ladeport**

**Ladeport**

**Joystick**  
Styrer retning, hastighed og bremsekontrol

## Joystick og køretips

### Advarsel!

1. Undgå skarpe sving ved høj hastighed.
2. Skub køregrebet i den ønskede retning for at styre kørestolen. Grebet regulerer hastigheden proportionalt – jo mere du skubber det, desto højere bliver hastigheden. Den maksimale hastighed er begrænset til 6 km/t
3. Foretag ikke ændringer i joystick-indstillingerne. Hvis du oplever ændringer i, hvordan kørestolen reagerer på styring, skal du kontakte serviceleverandøren.

## Betjeningsretning for joystick


Joysticket gør det muligt at styre kørestolen fremad, bagud, til venstre og til højre, samt regulere acceleration, opbremsning og stop.



Når køregrebet står lodret, er kørestolen i standby. Skub grebet frem for at køre fremad. Jo mere det skubbes frem, desto højere bliver hastigheden.



Reducér trykket fremad på køregrebet forsigtigt for at sænke hastigheden. Når grebet vender tilbage til lodret position, stopper kørestolen, og bremserne aktiveres.

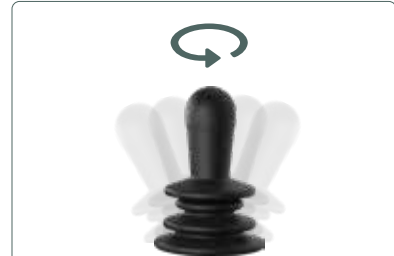

Kørestolen vil dreje til højre, venstre eller køre bagud afhængigt af retningen og hvor meget køregrebet bevæges.

## Display

<p><b>Bluetooth Status</b></p> <p>Ikke tilsluttet    Tilsluttet</p>	<p><b>Låsestatus</b></p> <p>Ulåst    Låst</p>	<p><b>Temperatur</b></p> <p>Overophedet    For kold</p>	<p><b>Advarsel om hastighedsbegrænsning</b></p> <p>Advarsel om reduceret hastighed ved lav batterikapacitet. Batteriet skal oplades straks.</p>
---	---	---	---

**Nuværende hastighed**

**Batteri-indikator**

**Hastighedsniveau**  
Hastighedsniveauet justeres med [+] og [-]-knapperne mellem 1 (lavest) og 5 (højest).

**Samlet kørelængde (km)**

<p><b>Lavt batteri</b></p> <p>Indikatoren bliver gul, og én bjælke vises. Ikonet for hastighedsbegrænsning vises i øverste højre hjørne.</p>	<p><b>Tom for strøm</b></p> <p>Ikonet for hastighedsbegrænsning i øverste højre hjørne lyser, når batteriniveauet er ved at være tomt.</p>	<p><b>Opladningsstatus</b></p> <p>Det grønne ikon blinker kontinuerligt under opladning.</p>
--	--	--



# BANO LIFE

**Når den lille forskel betyder alt**

Hjælpemidler, som giver dig friheden til at leve på egne præmisser.

Bano Life  
Karetmagervej 19B, DK-7000 Fredericia  
info@banolife.com  
tlf. 75 56 32 44

**banolife.dk**