
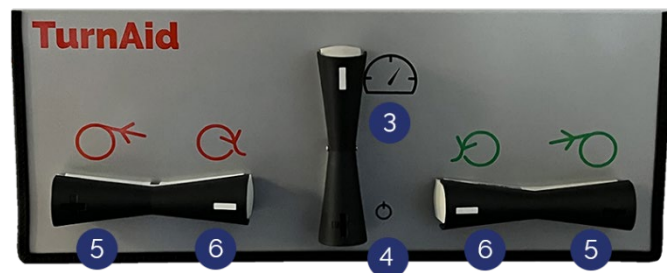


Håndbetjening og Fodbetjening

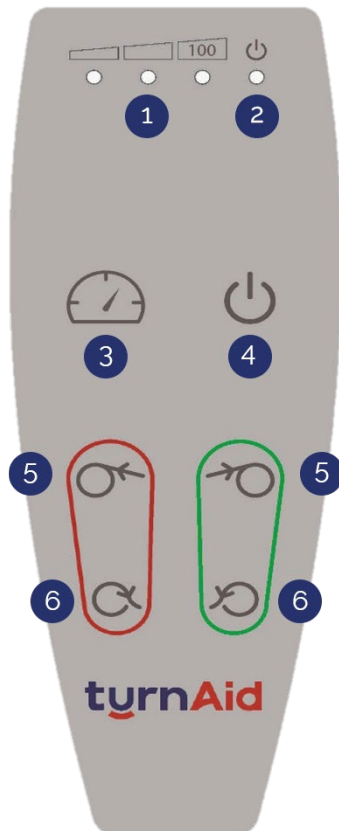

1. Lysdioder for hastighed.

2. ON lysdiode:

→ Lyser gult, når systemet er aktivt
→ Hvis systemet ikke er aktivt, slukkes diodelysen.

→ Når den gule ON diode, lyser: skal plejeren omgående benytte TurnAid T4 systemet.

3. Hastighed/Speed control:

Skifter mellem 100 -75 -50 % i hastighed.

4. HÅNDBETJENING ON-knap:

→ Til at aktivere systemet ved at trykke 2 tryk efter hinanden.

→ Kan også anvendes som STOP knap ved et langt tryk på over 2 sekunder.

4. AKTIVERING AF FODBETJENING ON-knap:

→ Tap to gange.

→ Fodbetjening slukkes automatisk efter 1.5 minut uden brug.

5. Betjening til henholdsvis rød og grøn motorrulle:

Stramning af træklagen.

6. Betjening til henholdsvis rød og grøn motorrulle:

Slækning af træklagen.

Rengøring af lagen

	Glidelagen	Træklagen
Beskrivelse	leveres kun i hvidt. 100% nylon.	leveres kun i hvidt. 50% polyester / 50% bomuld
Rengøringsanvisning	Før vask, luk velcro-båndende. Vaskes ved maks. 95°C	Vaskes ved maks. 95°C
Behandling	Tørretumbling ved normal temperatur. ÷ strygning	Tørretumbling ved normal temperatur. + strygning på ••

De tre funktionsindstillinger

Detaljeret instruktioner – se afsnit 7.2 i brugermanualen.



"Sengehest – position"
(under vending)
den ene side har rullen på toppen og den anden side fungerer som sengehest



"Vende – position"
(under vending)
rullen på den ene side vendes fra en nederst position til topposition.



"Nedfældet – position"
(ud af seng position eller fra side til side)
række-afstanden til borger mindskes, gør det lettere at arbejde med patienten ved f.eks. vask, påklædning, afklædning osv.



Find
Brugermanualen

V.4 Quick Guide - 2025