



TILBEHØR TIL MULTICARE



MULTICARE INTENSIV TERAPISENG

Multicare er udviklet og produceret i Europa i tæt samarbejde med sygeplejersker og terapeuter på intensivafdelinger. Sengen understøtter:

Forebyggelse af sengelejekomplikationer

F.eks. ved hjælp af automatisk, programmerbart sidelæns tilt (ALT), der understøtter venderegimet og forebygger trykskader og lungekomplikationer

Personalets arbejdsmiljø

F.eks. ved håndfri betjening vha. fodpedaler af det sidelæns tilt og af højdeindstillingen. Og ved ergonomisk korrekt placering af betjeningspanelet i god arbejdsstilling samtidig med, at man er i øjenhøjde med patienten

Patientsikkerheden

F.eks. ved udstigningsalarm og automatisk tilkobling af sengens bremses, hvis sengen efterlades ulåst

Tidlig mobilisering

Forskellige funktioner i sengen understøtter alle faserne fra den allertidligste mobilisering, hvor patienten er passiv, til den løbende aktivering og involvering af patienten i mobiliseringen



TILBEHØR TIL MULTICARE

- Dropstativ
- Urinposeholder
- Tube-holder (følger sengens bevægelse)
- Sæt stabiliseringspuder
- Oxygenholder horisontal
- Oxygenholder vertikal
- Sengehest-forlænger
- Monitorhylde
- Skriveplade ved fodenden
- Ekstra madrasovertræk, underdel
- Ekstra madrasovertræk, overdel
- Glat betræk
- M.fl.



SÆRLIGE FUNTIONER – læs evt. mere i produktbrochuren

- MobiLift®: Et særligt håndtag, der kan foldes op som håndtag til patienten, hvorfra han/hun kan både støtte og hæve sengen ved udstigning. Sammen med grebet i sengehesten til den anden hånd giver det god støtte og mulighed for aktiv deltagelse fra patientens side ved mobilisering og udstigning
- i-Brake®: Sengen slår selv bremserne til, når sengen sluttes til strøm
- i-Drive®: Motoriseret 5. hjul (der hæves, når det ikke bruges) letter transport med sengen over længere afstande
- Ergoframe®: Udvider sengebunden ved bækkenområdet, når ryglænet hæves for at reducere vævskompression



- Udstigningsalarm kan stilles til at give alarm hvis patienten enten forlader sengen eller forsøger at forlade sengen (to indstillinger)
- Røntgenkassetteholder er integreret i selve sengebunden = man kan tage billedet uden at flytte på patienten overhovedet
- 30 graders stop: Hold én knap inde og sengens hovedgærde indstiller sig automatisk til præcist 30 graders vinkel
- Motoriseret forlængelse af liggefladen
- Lommelygte i en af fjernbetjeningerne

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ydre dimensioner med sengehestene oppe	215 x 105cm
Forlængelse	22cm
Anbefalet madrastørrelse mellem:	200-217 x 86-96cm
Maks madrashøjde	23cm
Sengehøjde	44 –82cm
Maks vinkel, rygdæl	70°
Maks vinkel, bendel	30°
Sidelæns kip	30°
Trendelenburg/reverse Trendelenburg position	13°/16°
Sengehesthøjde over madrassen	45cm
Sengens vægt	224kg
Safe working load	250kg
Maks belastning, galge	75kg

UNDERVISNING

- Undervisning af sundhedsfagligt personale tilrettelægges lokalt og tilpasses i forløb, hvor både dag- og aftenvagt får lejlighed til at deltage.
- Teknisk personale certificeres lokalt via et 2-dages forløb tilrettelagt, så der er god tid til at blive fortrolig med, hvordan man vedligeholder sengen.

Vi har god erfaring med at undervise i sengene og modtager som regel rigtig positiv feedback for forløbene.



MULTICARE PRODUCERES AF LINET OG ANVENDES PÅ HOSPITALER VERDEN OVER

- LINET er Europas største producent af hospitalssenge
- Effektiv serieproduktion på egen fabrik: høj kvalitet og sikker levering (også store antal)
- Referencer fra de mest moderne og anerkendte hospitaler i verden – herunder i Sverige, Norge og Finland.
- Alle produkter er testet og opfylder gældende sikkerhedsstandarder for hospitalssenge
- Alle produkter gennemgår en kvalitetskontrol inden de forlader produktionslinjen og virksomheden er ISO 9001, ISO 13485 og ISO 14001 certificeret



<http://www.linnet.com/en/>

□



Karolinska Universitetshospital i Stockholm er et af Europas største universitetshospitaler. Hospitalet er sammen med Karolinska Institutet et medicinsk center med et højt internationalt ry.

Karolinska har i alt 66 Multicare-senge til deres intensiv-patienter.

Karolinska og LINET Sverige har desuden, i samarbejde, udviklet en særlig version af Multicare, der er godkendt til at anvendes i trykkammer.