

## Vaskevejledning



SAFE Med skumprodukter kan vaskes ved temperatur op til 95°C.

De vaskes i vaskemaskine efter behov ved 40-95°C.

Brug almindeligt husholdningsvaskemiddel og undgå blegning med klor.

Vigtigt at intet kan vikle sig omkring skumproduktet i vaskemaskinen.

**HUSK SKYLLEMIDDEL eller blødgøring af vand til at neutralisere evt. kalk i vandet.**

Tåler høj centrifugering.

Efter høj centrifugering er tørretumbling ved eksempelvis 90°C ca. 20 minutter.

Undgå at trække skumproduktet ud af vaskemaskinen, og det vil sige nænsom håndtering.

Produktet skal være rimelig blødt, og der skal gerne være lunt i vaskerummet for at få det i vaskemaskinen. Produktet kan blødgøres i balje med vand inden, hvis det er nødvendigt.

Vaskeservicefirmaer eller møntvaskerier har store vaskemaskiner og tørretumblere, som kan vaske større skumprodukter. Vores produkter bliver brugt indenfor sundhedssektoren, hvor hjælpemiddeldepoter i Danmark netop har store vaskemaskiner og store tørretumblere til tørring.

## Tørremetode

SAFE Med skumproduktet kan tørretumbles ved høj temperatur. Efter høj centrifugering er tørretumbling ved eksempelvis 90°C ca. 20 minutter.

Alternativ tørremetode er at hænge skumproduktet op i et tørreskab.

Ved 40°C varme i tørreskab er tørretiden 2 døgn/48 timer.

Ved tørretumbling tages skumproduktet ud af maskinen før kold luft, for at undgå det temperaturfølsomme skum bliver stift.

**Autoklave: SAFE Med skumprodukter kan autoklaveres,  
damp eller varmluft steriliseres ved 134°C.**