

5. Vedligeholdelse

Rengøring

- ✓ Rammen kan aftørres med en fugtig klud. Ved meget smuds kan et mildt rengøringsmiddel anvendes.
- ✓ Rammen bør også regelmæssigt undersøges for lakskader, da disse kan føre til korrosion.
- ✓ Vigtigt! Sand og saltvand, såvel som salt fra saltstrøning om vinteren beskadiger lejerne i forhjul og drivhjul. Hvis kørestolen har været udsat for dette skal hjulene skylles med rent vand.
- ✓ Sædet og ryggen er fremstillet af en stærk og holdbar nylon. For rengøring kan de tages af, idet skruerne der fæstner dem løsnes. Rengøres med en svamp og en mild sæbeopløsning. Kan også desinficeres med et almindeligt desinfektionsmiddel (f.x. Sagrotan®)

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen

Opbevaring

Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted.

Genanvendelse

Ved genanvendelse af kørestolen skal brugervejledningen medleveres. Kørestolen skal forinden kontrolleres iht. nedenstående vedligeholdelsescheckliste, og skal være uden funktionsfejl.

Vedligeholdelsescheckliste - Følgende skal regelmæssigt kontrolleres:

Beskrivelse	Inspektion	Hyppeghed
Dæk	Hvis der er monteret luftdæk skal lufttrykket kontrolleres. Derudover kontrolleres at der er tilstrækkelig profil, og at der ikke er revner i dækket. Der efterfyldes med luft og hvis dækket er nedslidt skal det skiftes.	Mindst 1 gang per uge
Eger	Løse eger kan betyde at fælgen bliver skæv. Tag kontakt med en forhandler eller serviceværksted for at få egerne strammet.	Når problemet indtræffer.
Aksler	Fjern de evt. Opsamlede urenheder og smør med tynd symaskineolie.	Hver 6'te uge eller oftere når der er nødvendigt
Drivringe	Beskadigede eller stærk kradsede drivringe bør udskiftes, idet det eller kan medføre skader på hænderne.	Når problemet indtræffer.
Bremser	Afprøv om bremserne bremser korrekt, og at de går let. Bremseevnen afhænger også af lufttrykket hvis det er dæk. Hvis der er snavs på bremserne skal dette fjernes med en fugtig klud. Bevægelige dele skal smøres med en tynd olie.	Mindst 1 gang per måned.
Ramme	Kontroller jævnlgt om rammen er beskadiget eller har skader i lakken.	Mindst 1 gang per måned.
Forhjul	Mellemrummene mellem gafflen og forhjulene skal holdes rene. Opsamlet smuds skal fjernes regelmæssigt, da lejerne ellers slides ligesom hjulene vil blive bremset af hår og skidt. Hvis der er mange hår eller meget skidt kan det være nødvendigt at afmontere hjulet, rengøre, og smøre med en tynd olie.	Mindst 1 gang per måned eller oftere hvis det er nødvendigt
Aftagelige dele	Kontroller at delene fungerer, og kan bevæges. Hvis der er løse bolte skal disse fastgøres.	Mindst 1 gang per måned.
Drivhjul samt quick release aksler	Drivhjulene vaskes med en fugtig klud, og evt. en mild sæbeopløsning. Hjulene afmonteres og quick release aksler aftages. Akslerne rengøres og smøres med en tynd olie.	Hver 6'te uge eller oftere når der er nødvendig