

Vaskevejledning: Topmadrasser



SAFE Med topmadrasser kan vaskes ved temperatur op til 95°C.

Madrasserne vaskes i vaskemaskine efter behov ved 40-95°C.

Brug almindeligt husholdningsvaskemiddel og undgå blegning med klor.

Vigtigt at intet kan vikles sig omkring topmadrassen i vask.

HUSK SKYLLEMIDDEL eller blødgøring af vand til at neutralisere evt. kalk i vandet.

Tåler høj centrifugering.

En topmadras skal være rimelig blød, og der skal gerne være lunt i vaskerummet for at få madrassen i vaskemaskinen. Den kan blødgøres i balje med vand inden, hvis det er nødvendigt.

En topmadras, der måler 200x90x3 cm, kan være i en vaskemaskine med 8 kg tromle.

En topmadras, der måler 200x90x6 cm, kan være i en vaskemaskine med 12 kg tromle.

Undgå at trække topmadrassen ud af vaskemaskinen, og det vil sige nænsom håndtering.

Vaskeservicefirmaer eller møntvaskerier har store vaskemaskiner og tørretumblere, som kan vaske og tørre topmadrasser. Vores topmadrasser bliver brugt indenfor sundhedssektoren, hvor hjælpemiddeldepoter i Danmark netop har store vaskemaskiner, som topmadrasserne vaskes i og store tørretumblere som topmadrasserne tørres i.

Tørremetode

SAFE Med topmadrasser kan tørretumbles ved høj temperatur. Efter høj centrifugering er tørretumbling ved eksempelvis 90°C ca. 20 minutter.

Alternativ tørremetode er at hænge madrasserne op i et tørreskab.

Ved 40°C varme i tørreskab er tørretiden 2 døgn/48 timer.

Ved tørretumbling tages topmadrassen ud af maskinen før kold luft, for at undgå det temperaturfølsomme skum bliver stift.

**SAFE Med topmadrasser kan også autoklaveres,
damp eller varmluft steriliseres ved 134°C.**