

Service og vedligeholdelse

ROTOBED®



RotoBed® plejesenge behøver ikke megen vedligehold, men det vil minimere eventuelle problemer at holde sengen ren og følge anvisningerne i forhold til brug og rengøring.

Daglig brug vil medføre et naturligt slid på motorerne, hvorfor vi anbefaler et årligt serviceeftersyn. Dette kan tilkøbes og vil forlænge garantiperioden. Service udføres af professionelle fagfolk. For en serviceaftale, kontakt venligst RotoBed på tlf. 0045 7550 5025 eller på info@rotobed.com

Fravælges en serviceaftale, anbefaler vi følgende eftersyn:

1. Kontrol af elektriske dele

- Tjek alle strømkabler for skader.
- Tjek strømstikkets tilstand.
- Tjek driften af batteriets backup system
- Kontroller fjernbetjeningens funktioner.

2. Kontrol af mekaniske dele

- Tjek alle rammekomponenter for slid, skade og korrosion.
- Tjek at ryg- og ben-dele kører roligt og ved fuld kraft ved brug af fjernbetjeningen.
- Tjek at løftmotoren kører roligt og for fuld kraft.
- Tjek at drejemotoren kører roligt og for fuld kraft.
- Tjek at alle samlinger (møtrikker, skruer etc.) er strammet.
- Tjek sengegalgen (hvis monteret).
- Påfør fedt til alle bevægelige dele og fjern overskydende fedt.

3. Kontrol af hjul

- Tjek at alle hjul har fri bevægelighed og drejer tilfredsstillende.
- Tjek bremsernes function.

4. Kontrol af sengeheste

- Tjek sengehestens funktion.
- Tjek sengehestenes greb for beskadigelser.