

Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Smør hjulens aksler regelmæssigt med smøreolie. Kontroller jævnligt at alle dele sidder fast, og efterspænd greb og skruer. Hvis der er dele der er brækkede, revnede eller meget slidte skal forhandleren kontaktes. Produktet udsættes for slid ved brug, og det anbefales regelmæssigt at få udført en kontrol af en fagmand.

Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Hjulene kører kun svært rundt	Der er skidt mellem hjulene og gafflen	Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie
Bremserne virker ikke som de skal eller een af bremserne virker bedre end den anden.	Bremseskoen er slidt eller bremserne er ikke justeret korrekt	Forsøg at justere bremsekablet. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren
Sædet er ikke i horisontal position	De 4 hjul er ikke justeret til samme højde	Kontroller om hjulene er justeret korrekt og hvis ikke ændres hjuljusteringen

Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.