

VEDLIGEHOELDESESINFO:

Produktets vedligeholdelse består af rengørings- og sanitetsprocedurer. For at sikre en sikker brug og passende hygiejnestandard skal brugeren udføre disse procedurer før hver brug. Brugeren skal sikre sig den strukturelle integritet af enheden og dens komponenter og tæthed af skruerne skal kontrolleres. For rengørings- og sanitetsprocedurer, følg trinene nedenfor:

1. Handsker skal bæres.
 2. Fjern enheden efter brug for at sikre den mest præcise desinfektion.
 3. Brug vand eller et ikke-aggressivt rengøringsmiddel til rengøringsproceduren.
 4. Tør med en tør og ren klud.
- Alternativt kan enheden rengøres i opvaskemaskine ved maksimum temperatur.