

5 VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Rengøring

LUNA® X5 enheden, håndbetjeningen og skinner kan rengøres og desinficeres med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler:

- Universalrens med neutral PH-værdi 6-9.
- Isopropyl alkohol (hospitalssprit) med op til 99 % Isopropanol.
- Klorbaserede produkter med op til 10.000 ppm.
(Ved længerevarende eller gentagen eksponering af en stor mængde klor i høj koncentration vil produktet, samt tilbehør kunne misfarves og ændre tekstur).

Tør loftliften og skinnerne af med en ren klud.

Andre kemikalier og stærke rengøringsmidler må ikke anvendes.

5.2 Opbevaring

LUNA® X5 skal opbevares ved normal indendørs temperatur (+2 – +40°C) samt i tørre omgivelser med en relativ luftfugtighed fra 20% - 80%.

OBS! LUNA® X5 bør oplades helt inden den sættes til opbevaring. Batterierne aflades over tid og det anbefales derfor at genoplade loftliften hver tredje måned, for at undgå skader på batterierne.

6 EFTERSYN, GARANTI OG FEJLFINDING

6.1 Periodisk eftersyn

Winncare foreskriver et årligt eftersyn i henhold til ISO 10535:2021, som skal udføres af enten Winncare eller andet kvalificeret teknisk personale.

Det påhviler ejeren af produktet at sikre, at det periodiske eftersyn bliver overholdt.

Ved udskiftning af komponenter, må der kun anvendes originale reservedele fra Winncare for at sikre produktets funktioner og sikkerhed.

LUNA® X5 er udstyret med et serviceikon () på frontpanelet af liften, der giver følgende information om det periodiske eftersyn:

Diode farve	Beskrivelse
Gul 	Når der er 1 måned til det årlige service af LUNA® X5: - Serviceikonet lyser gult i 30 sek. ved aktivering. - Ved det periodiske eftersyn, bliver loftliften nulstillet og serviceikonet stopper med at lyse gult indtil der igen er 1 måned til det årlige service.
Orange 	Når LUNA® X5 har overskredet det årlige service med 1 måned. - Serviceikonet lyser orange indtil den går i dvale. - Ved det periodiske eftersyn, bliver loftliften nulstillet og serviceikonet stopper med at lyse orange. Når det igen er tid til det årlige service, starter lysindikationen forfra fra gul.
Orange + Bip 	Når LUNA® X5 har overskredet det årlige service med 2 måneder. - Serviceikonet lyser orange indtil den går i dvale og der vil ved aktivering af loftliften lyde 3 "bip"-signaler. - Ved det periodiske eftersyn, bliver loftliften nulstillet og serviceikonet stopper med at lyse orange samt "bippe". Når det igen er tid til det årlige service, starter lysindikationen forfra fra gul.

OBS! I tilfælde af at LUNA® X5 skal anvendes i lande med lovkrav om periodisk eftersyn efter 6 måneder, kan serviceindikatoren indstilles til dette af teknikeren.

For yderligere beskrivelse, rekvirer en installationsguide. (Se afsnit 3.1).

Udvidet eftersyn

Ved installering af LUNA® X5 og skinnesystemer i aggressive miljøer som f.eks. klorerede svømmehaller, spa områder, ridestalde eller lignende, gælder særlige forhold.

I disse miljøer skal der udføres et eftersyn på loftliften hver 6. måned af WinnCare, eller en teknisk kvalificeret person som er uddannet af WinnCare.

Hvis der konstateres slitage, beskadigelse eller korrosion ved service, skal disse dele udskiftes og hver 5. år skal samtlige bærende dele udskiftes. Ved udskiftning SKAL der anvendes originale reservedele fra WinnCare af sikkerhedsmæssige årsager.



ADVARSEL!

Ved anvendelse af LUNA® X5 i svømmehal og spaområder, skal loftliften være monteret direkte i skinnen, så den ikke risikere at blive nedsænket i vand (Se Fig. 4.3A og 4.3B).

Personlige sikkerhedstjek og tekniske eftersyn af kvalificeret tekniker skal udføres iht. følgende skema:

Sikkerhedstjek	Før brug	Halvårligt	Årligt
Personlige sikkerhedstjek (Uddybet i afsnit 2.4)			
LUNA® X5 kan køre op og ned	•		
Løftestrop er intakt	•		
Ingen mislyde fra LUNA® X5	•		
Nødstop virker	•		
Ågets kroge virker	•		
Teknisk periodisk eftersyn (årligt) Udvidet eftersyn (halvårligt)			
Inspektion af skinneresystem: - Kontrolpunkter uden belastning			
Fastgørelsespunkter til loft/væg		•	•
Skiner: samlinger og bolte		•	•
Kørevogne: svejsninger, hjul og kørefunktion		•	•
Endestop		•	•
Efterse for tegn på korrosion		•	•
Inspektion af loftlift: - Kontrolpunkter med vægtbelastning SWL			
Vægttest af loftlift og skinner		•	•
Visuel kontrol af loftlift og håndbetjening		•	•
Loftlift og håndbetjening, alle knapper fungerer		•	•
Test manuel nødsænkning		•	•
Strop ingen slitage (hvid inderkerne må ikke være synlig)		•	•
Kontrollér skruerne på stroppens bajonet		•	•
Ledninger/kabler er intakte		•	•
Test opladningsfunktion		•	•
Inspektion af tilbehør			
Løfteåget for tegn på skader		•	•
Dørkobling: Åbne-/lukkefunktion og sikkerhedsstop		•	•
Funktionaliteten på kroge/ophængningspunkt samt drejeled af løfteåget		•	•

Garanti

Der ydes 5 års garanti på produktet. Se garantibestemmelserne på www.Winnocare.com