

Hera

Dokumentationsbord



Scan-Med a/s
Denmark

Indhold

Forord:	2
Generelt:	2
Tilsigtet produktanvendelse:	2
Leverandørens produktansvar:	2
Betjening af stallets funktioner:	4
Rengøringsanvisning:	5
Tekniske specifikationer	7
Overensstemmelseserklæring	9
Basismodel:	10
Tilkøbspakker	11
Ergonomi	12
Komponentplacering	13

Forord:

Tak for at De har købt Deres højderegulerbare dokumentationsbord hos Scan-Med A/S. Anvend og vedligehold produktet efter vores anvisninger, så vil det fungere til Deres tilfredshed i mange år.

Generelt:

Produktet må kun installeres og anvendes i overensstemmelse med denne anvisning. Alle brugere af produktet skal have læst og forstået denne anvisning. Hvis De har spørgsmål vedrørende anvendelse eller vedligeholdelse af Deres produkt, er De velkommen til at kontakte os.

Tilsigtet produktanvendelse:

Det højderegulerbare rullebord er designet og konstrueret til industriel anvendelse som dokumentationsbord på hospitaler, i laboratorier, lægepraksis osv. Bordpladen kan reguleres 62 cm op/ned vha. elektrisk batteridrevet motorsystem. Bordpladen kan maksimalt bære 40 kg. jævnt fordelt belastning.

Leverandørens produktansvar:

Scan-Med A/S påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sammensættes på anden vis end angivet i denne anvisning.

Advarsel:

Produktet er udført i kraftig stålplade og er yderst holdbart og stabilt. Dog skal der tages hensyn til produktets maksimale løfteevne og stabilitet specielt med bordpladen kørt i øverste position.

Advarsel:

Når bordpladen hæves eller sænkes er der potentiel klemningsfare mellem bordpladen og eventuelle tilstødende faste eller mobile genstande/elementer.

Brugeren skal før anvendelse af rullebordets hæve/sænke funktion altid sikre sig, at der ikke er hindringer eller personer over eller under eller i umiddelbar nærhed som kan hindre bordpladens bevægelse.

Advarsel:

Rullebordet må IKKE anvendes som transportbord, løftehjælpemiddel, lift, kran eller lign.

Advarsel:


Produktet må IKKE betjenes af børn, ej heller under opsyn af voksne.

Betjening af stallets funktioner:

Bordets højderregulering styres vha. kontakten på oversiden af bordpladens forkant, hvor man kan vælge mellem op eller ned tasten. Tasten holdes nede indtil den ønskede position er nået. Når tasten slippes, standser bevægelsen straks.

Bordpladens elektriske højderregulering er batteridrevet. Hvis batteriet trænger til opladning afgives et akustisk signal under drift. Batteriet oplades ved at tilslutte forsyningsledningens stikprop til et 230V~ vægudtag. Batteriladningen er elektronisk styret og batteriet kan ikke overoplades!

Rullebordet kan bremses individuelt vha. bremsepedalerne på de 2 hjul.

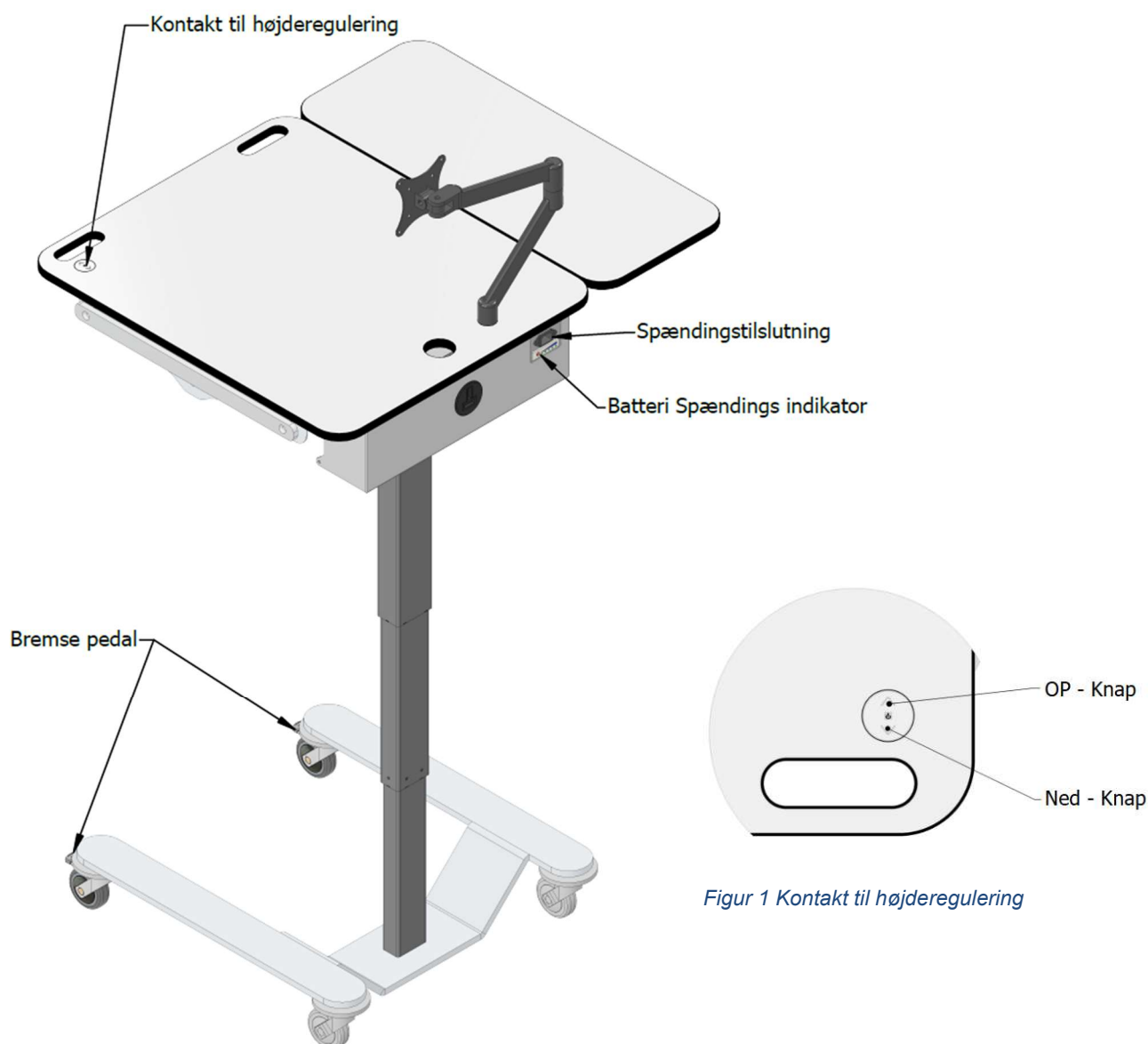

Figur 1 Kontakt til højderregulering

Betjening af stallets funktioner (fortsat):

Maksimal brugscyklus er uanset belastning 2/18, 2 min. kontinuerlig brug efterfulgt af 18 min. pause. Overbelastning vil resultere i overophedning af motor mv. og medføre en reduktion af systemets samlede levetid.

Før transport/kørsel med rullebordet anbefales det af stabilitetshensyn at regulere bordpladen til lavest mulige position. Samt slå sidebords plade ned i lodret position hvis denne er monteret.

Kontroller altid før anvendelse at den samlede vægtbelastning på bordpladen ikke overstiger 40 kg (jævnt fordelt) og at produktet ikke er beskadiget eller i øvrigt i uorden således at der kan opstå faretruende situationer.

Anbefalet vedligeholdelse og service:

Vedligeholdelse af hæve/sænke stallet må kun udføres af uddannet personale

- Før ibrugtagning af produktet

Kontroller at alle elektriske elementer fungerer korrekt, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

- Hvert år eller efter behov

Serviceeftersyn indeholdende bl.a. efterspænding af alle samlinger, smøring af bevægelige dele, kontrol og sikkerhedstest af motorenes mekaniske tilstand, kontrol af elektrisk bevægelige dele, samt kontrol af produktets sikkerhedsmæssige stand.

Rengøringsanvisning:

Produktet rengøres med vand og sæbe og tørres efter med en opvredet klud.


Produktet tåler desinfektion med 70-85% ethanol og rengøring med klorholdige produkter.



Produktet må ikke neddyppes, spules eller højtryksrenses med vand eller andre væsker.

Defekter:

Hvis der høres skurende lyde under betjening, skal du HOLDE OP MED at bruge bordet.

Målskitse:

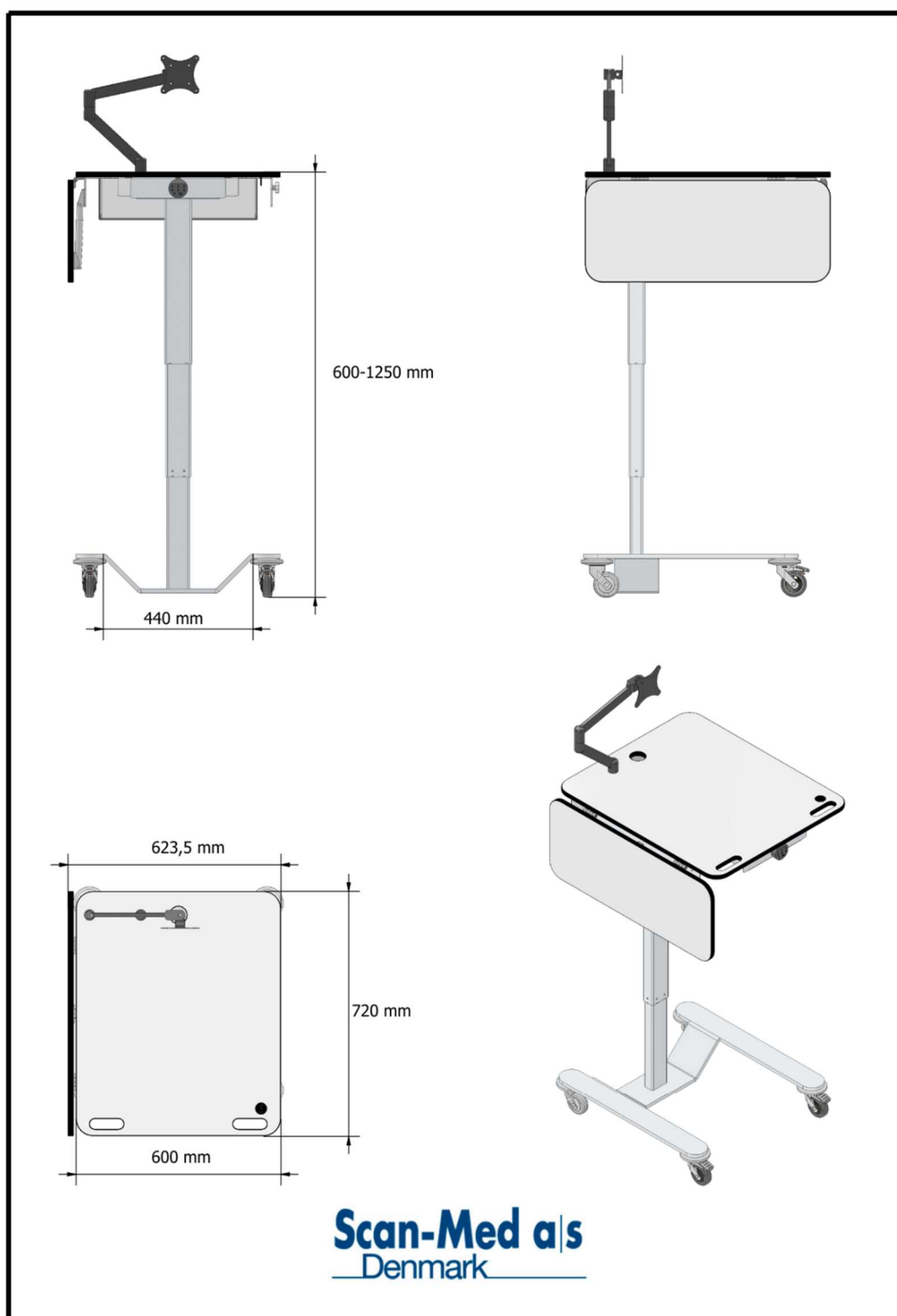

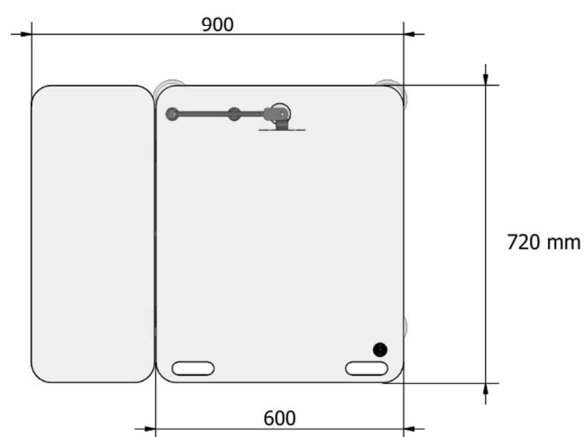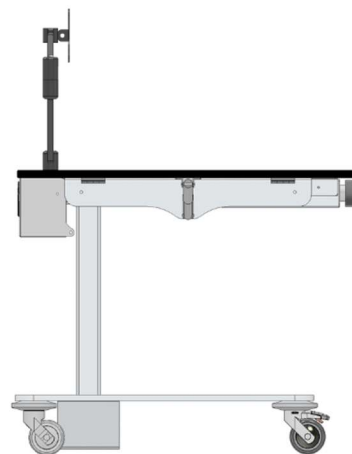

Tekniske specifikationer

- Ramme, Materialer:	Stål, pulver lakeret
- Bordplade materiale:	Kompakt laminat
- Vægt:	50 Kg
- Højde:	60 - 125 cm
- Bredde:	60 - 90 cm
- Dybde:	72 cm
- Tilslutningsspænding:	230 V~, 50-60Hz
- Intermittent (periodisk brug):	2/18, 2 min. kontinuerlig brug efterfulgt af 18 min. pause
- Lysniveau/støj:	<55 dB(A)
- Maksimal belastning på bordplade:	40 kg. (jævnt fordelt)

Overensstemmelseserklæring

Ferro Teknik ApS
Grimhøjvej 10
DK-8220 Brabrand

Erklærer herved at følgende produkt
Dokumentationsbord, model Hera
samt målvarianter efter samme konstruktionsprincip.

Er i overensstemmelses med bestemmelserne i følgende direktiver
2006/42/EC (MD) bilag 1.3.1 (Risiko for stabilitetstab), 1.3.2 (Brudfare under anvendelse),
1.3.4 (risici i forbindelse med overflader, kanter, hjørner), 1.3.7 (risici i forbindelse med
bevægelige dele), 1.5.1 (elektrisk energi), 1.5.10 (stråling), 1.5.11 (ydre stråling)
samt 2004/108/EC (EMC) og 2011/65/EU RoHS2

Brabrand d. 02.06.2025
Jes Bay Sørensen

Basismodel:



Tilkøbspakker



Ekstraustyrs pakker

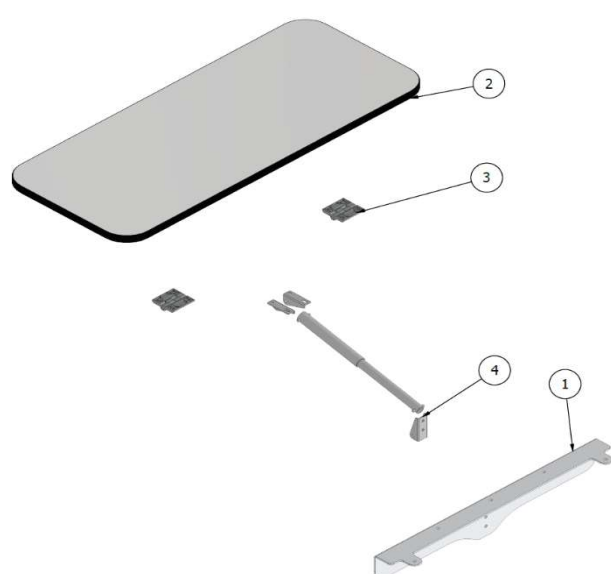


Figure 1 Sidebord pakke

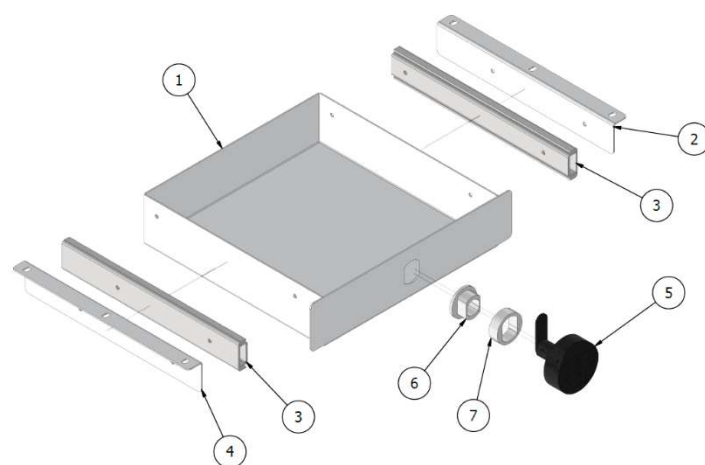


Figure 2 Skuffe pakke

Ergonomi

Vi anbefaler at brugeren sikrer sig god ergonomi ved arbejdspladsen herunder

- 1) Variation i arbejdsstillinger: Det er vigtigt at brugeren skifter mellem siddende og stående arbejdsstillinger for at undgå statisk belastning. Brug justerbare møbler, så brugeren kan tilpasse arbejdspladsen til sine behov.
- 2) Korrekt Støtte: Sørg for, at din stol giver god lændestøtte. Hvis du arbejder stående, bør du bruge en måtte, der aflaster fødder og ben

For at leve op til Arbejdstilsynets retningslinjer

Anbefaler vi at bordet primært anvendes som 'ikkestationær arbejdsplads' dvs. at det samlet arbejde varer få minutter ad gangen og samlet set ikke varer mere end 1-2 timer dagligt.

Vil arbejdet vare længere tid anbefaler vi at man anvender en fast arbejdsplads til arbejdet.

Bordets anvendelse er tiltænkt stående brug, eller kortvarigt siddende anvendelse.

Da benpladsen er begrænset ved siddende arbejde, anbefaler vi at brugeren sidder forskudt over et af bordbenene så bordbenet går mellem brugerens ben, for at forbedre fri bevægelse af benene.

Dette medfører dog at arbejdsfladen, hænder og arme støttes på, bliver reduceret og derfor anbefaler vi at man tilkøber sidepladepakken for at få bedst mulig støtteflade ved siddende arbejde.



Figure 3.1 Anbefalet til længerevarende siddende arbejde

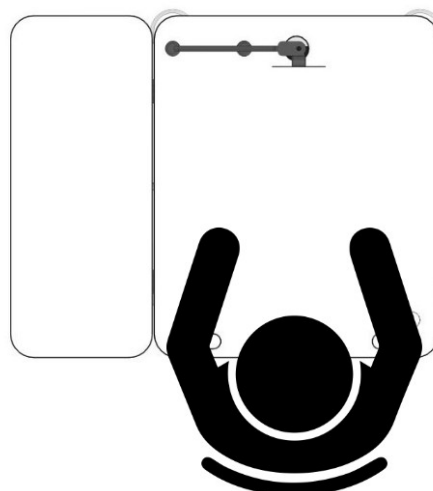


Figure 4.2 Anbefalet til kortvarigt siddende arbejde

Komponent placering

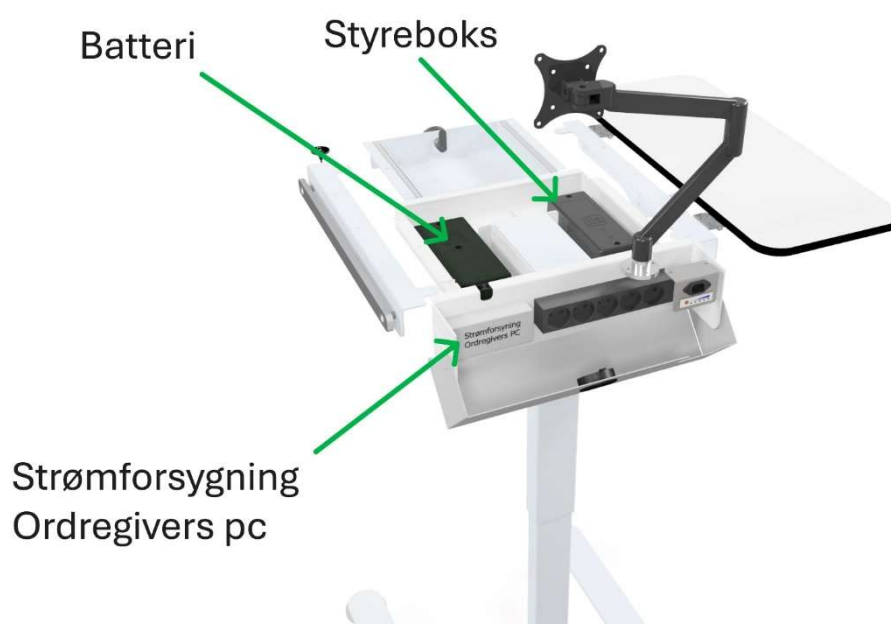


Figure 5 Bord vist uden bordplade